

**COMINOX s.r.l.**

Via Volta, 21
20048 CARATE BRIANZA
Milano (Italy)
Phone: +39 0362.91.23.12
Fax: +39 0362.90.09.40
www.cominox.com
e-mail: comm@cominox.it

**CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO RECAMBIOS**

STERILCLAVE 18 LCD

Codice Documento: RCM0218L



Il seguente manuale e i suoi allegati non possono essere messi o modificati, riprodotti né ceduti a terzi senza l'autorizzazione della **COMINOX s.r.l.**

*This handbook and its annexes may not be tampered with or modified, copied or given to third parties without **COMINOX s.r.l.'s** authorization.*



Certa della Vostra soddisfazione e a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione la **COMINOX s.r.l.** augura Buon Lavoro!

*We are sure you will be pleased with your purchase, and are always at your service for any explanations or assistance you may require. **COMINOX s.r.l.** wish You good work!*



Le présent manuel et ses annexes ne peuvent être ni endommagés ni modifiés, ni copiés ni cédés à des tiers sans l'autorisation de la société **COMINOX s.r.l.**

Certains de vous satisfaire et à votre disposition pour toute information et collaboration, **COMINOX s.r.l.** vous souhaite bon travail!



*Das vorliegende Handbuch und seine Anlagen dürfen ohne Genehmigung von der **COMINOX s.r.l.** weder umgestaltet, verändert, reproduziert noch an Dritte weitergegeben werden.*

*Die **COMINOX s.r.l.** ist sich der Zufriedenheit ihrer Kunden gewiß und steht für Informationen aller Art zur Verfügung.*



El manual y los anexos que presentamos no podrán ser manipulados o modificados, ni reproducidos o cedidos a terceros sin la autorización de la **COMINOX s.r.l.**

Estamos ciertos que ustedes quedarán satisfechos, quedamos a vuestra disposición para cualquiera aclaración y colaboración. La **COMINOX s.r.l.** les desea un muy Buen Trabajo!.



Il manuale va conservato con cura per tutta la durata della macchina, di cui è parte integrante; è quindi indispensabile nel caso di cessione della macchina accertarsi che vengano consegnati il manuale e tutti gli allegati (schemi, layout, fondazioni, ecc..)

The handbook must be kept in a safe place throughout the working life of the machine, of which it forms an integral part. If the machine is sold on, ensure that the handbook and all the annexes (diagrams, layouts, foundation drawings etc.) are also consigned.



Le manuel doit être conservé soigneusement pour toute la durée de vie de la machine dont il fait partie intégrante. Il est par conséquent indispensable, en cas de cession de la machine, de s'assurer de la remise du manuel et de toutes les annexes (schémas, layout, fondations etc..).



Das Handbuch ist sorgfältig über die gesamte Standzeit der Maschine aufzubewahren und ist als deren untrennbarer Bestandteil zu betrachten. Bei Verkauf der Maschine ist daher darauf zu achten, daß das Handbuch und sämtliche Anlagen (Pläne, Layout, Fundamentpläne usw.) übergeben werden.



Este manual debe ser conservado cuidadosamente durante toda la duración de la máquina de la cual forma parte integrante, y por lo tanto es indispensable controlar que, en caso de cesión de la máquina, se entregue también el manual con todos sus anexos (esquemas, layout, cimientos, etc.).



Le indicazioni riportate nel presente manuale non sostituiscono le disposizioni di sicurezza e i dati tecnici, per l'installazione e il funzionamento, applicate direttamente sul prodotto, né tantomeno le norme di sicurezza vigenti nel paese di installazione e le regole dettate dal comune buon senso.

The information in this handbook does not replace the safety regulations and technical data for installation and operation applied directly to the machine, the safety norms in force in the country of installation, or the rules dictated by common sense.

Les indications rapportées dans le présent manuel ne remplacent pas les dispositions de sécurité et les données techniques, pour l'installation et le fonctionnement, appliquées directement sur le produit, ni d'ailleurs les normes de sécurité en vigueur dans le pays d'installation et les règles dictées par le bon sens commun.

Die im vorliegenden Handbuch aufgeführten Anweisungen ersetzen nicht die Sicherheitsvorschriften und die technischen Daten für die Installation und den Betrieb, die direkt an der Maschine ausgewiesen sind, sowie auch nicht die im Einsatzland geltenden Sicherheitsvorschriften und die allgemeinen Verhaltensregeln.

Las indicaciones anotadas en el presente manual no substituyen las disposiciones de seguridad y los datos técnicos para la instalación y funcionamiento que se aplican directamente al producto, ni tampoco las normas de seguridad que están en vigencia en el país donde se instalará la máquina y las reglas que dicta el sentido común.

E' comunque necessario considerare che questo documento non può sopperire a carenze tecniche o intellettive che operatori e manutentori devono comunque possedere.

Bear in mind that this document cannot compensate for the shortcomings of operatives or maintenance staff who do not have the necessary technical skills or mental abilities .

Il est nécessaire de considérer que ce document ne peut faire face aux carences techniques ou intellectuelles des opérateurs.

Technische Kenntnisse und Fähigkeiten des Bedien- und Wartungspersonals werden vorausgesetzt. Das vorliegende Handbuch kann eventuelle Mängel in dieser Hinsicht nicht ausgleichen.

De todos modos es necesario considerar que este documento no puede reemplazar los conocimientos técnicos e intelectuales que los operadores y encargados del mantenimiento deben tener.



Per la richiesta delle parti di ricambio comunicare:

- Macchina Modello
- Matricola
- Numero del particolare
- Numero di pagina
- Descrizione del particolare
- Quantità desiderata
- Per il materiale elettrico indicare inoltre tensione (Volt) e frequenza (Hz)

Per usufruire delle condizioni di garanzia utilizzare solo ricambi originali.



By request for spare parts please mention:

- *Type of machine*
- *Serial number*
- *Number of spare part*
- *Page number*
- *Item denomination - Quantity*
- *For the electric material mention moreover the voltage (Volt) and the frequency (Hz)*

For warranty coverage original spare parts must be used.



Pour la demande des pièces détachées citer:

- Machine modèle
- Matricule
- Numéro de la pièce demandée
- Numéro de la page
- Denomination de cette pièce
- Quantité demandée
- Pour le matériel électrique, indiquer, en outre, la tension (Volt) et la fréquence (Hz)

Pour bénéficier des conditions de garantie, ne se servir que de pièces de rechange d'origine.



Anweisungen zur bestellung:

- *Maschinentyp*
- *Seriennummer*
- *Ersatzteilnummer - Seitennummer*
- *Bezeichnung des ersatzteiles*
- *Gewünschte Menge*
- *Fuer den elektrische Werkstoff zeigen ausserdem Spannung (Volt) und Frequenz (Hz)*


Garantie wird nur bei Verwendung von Original-Ersatzteilen gewährt.





Para el encargo de las piezas de repuesto citar:


- Model de maquina
- Numero de registro
- Numero de la pieza de repuesto
- Numero de la pagina
- Denominacion de la pieza
- Cantidad requerida
- Para el material eléctrico indicar adema la tension (Volt) y frecuencia (Hz)

Para agozar del derecho de garantía usar solamente repuestos originales.

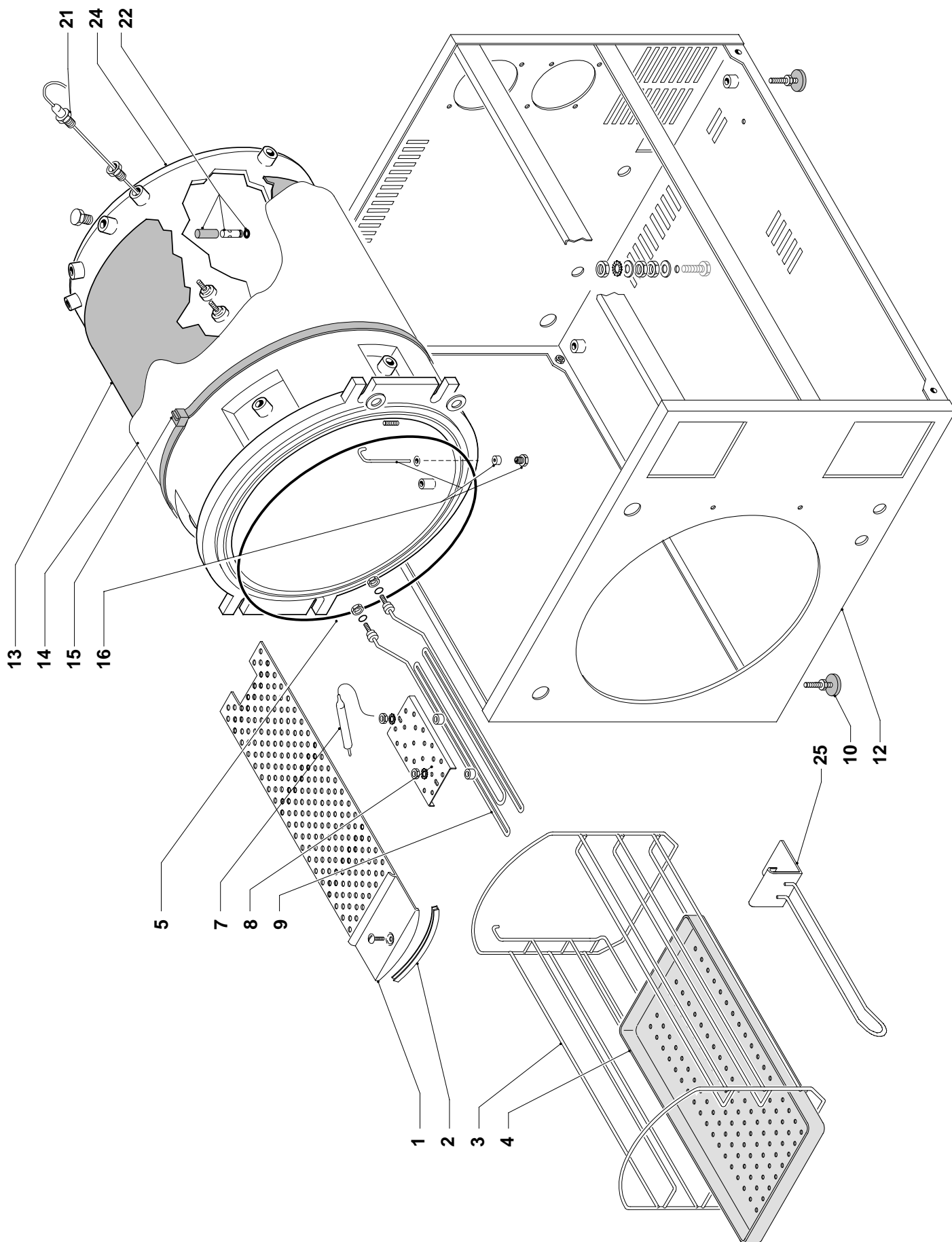


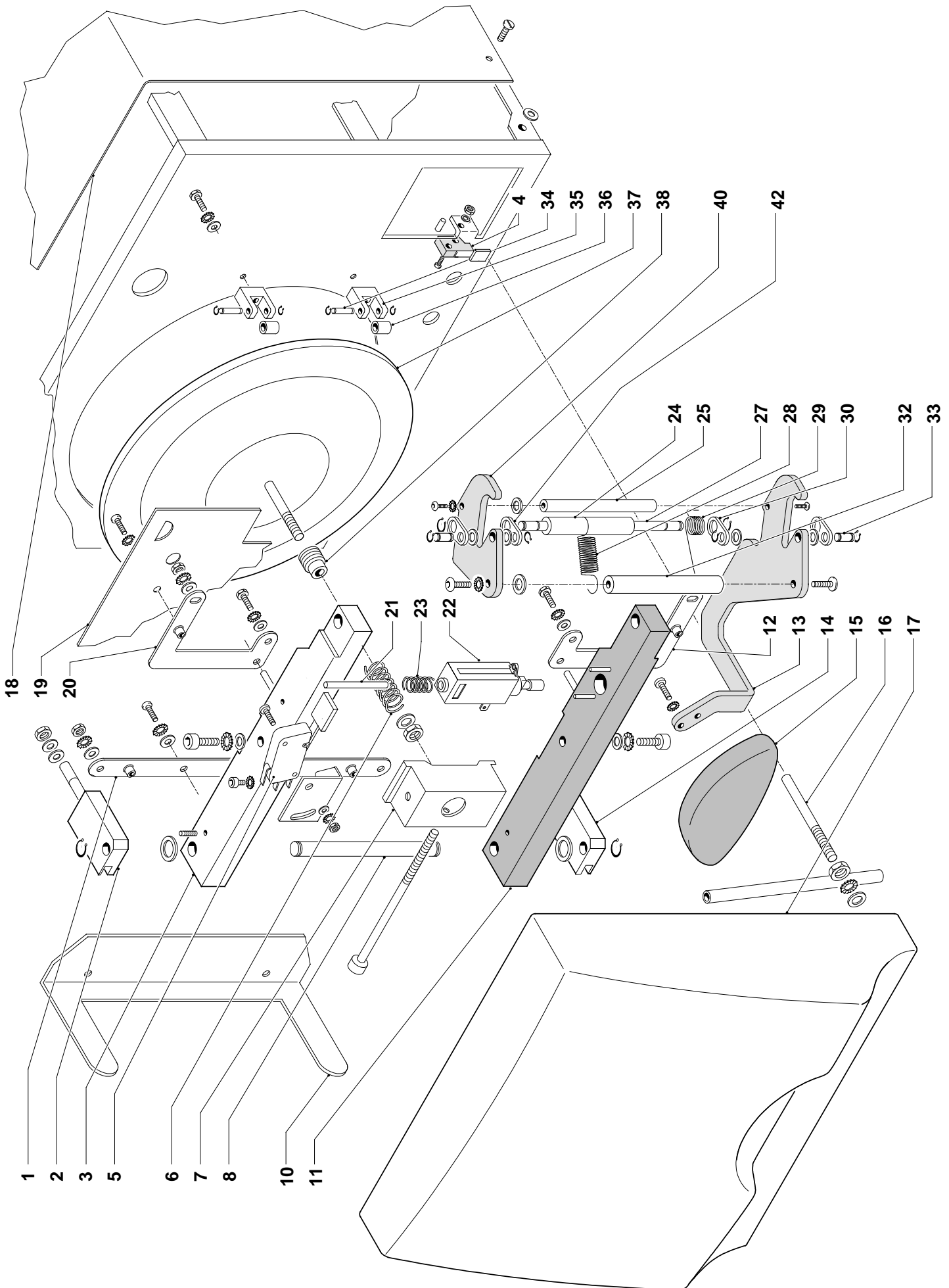

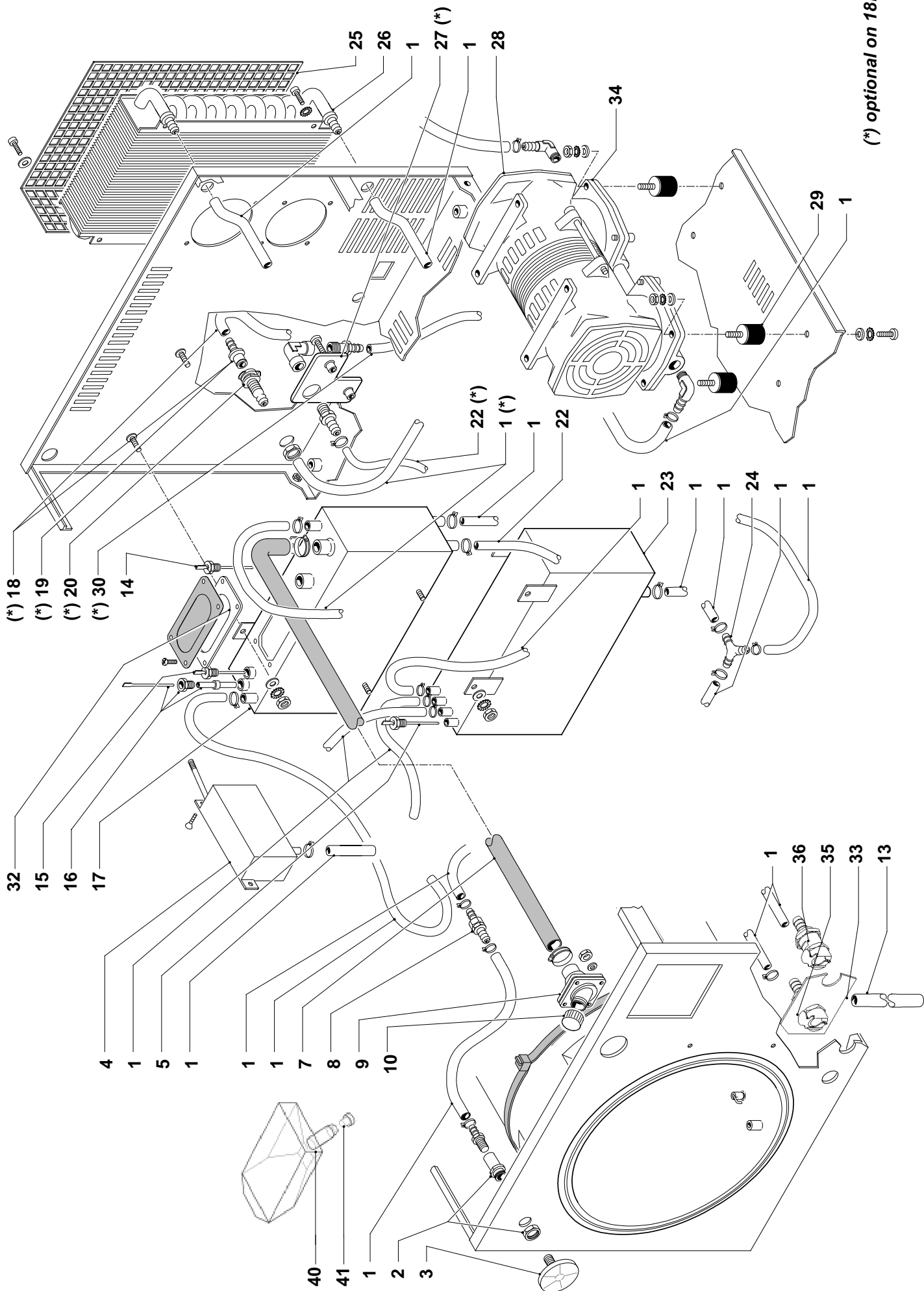


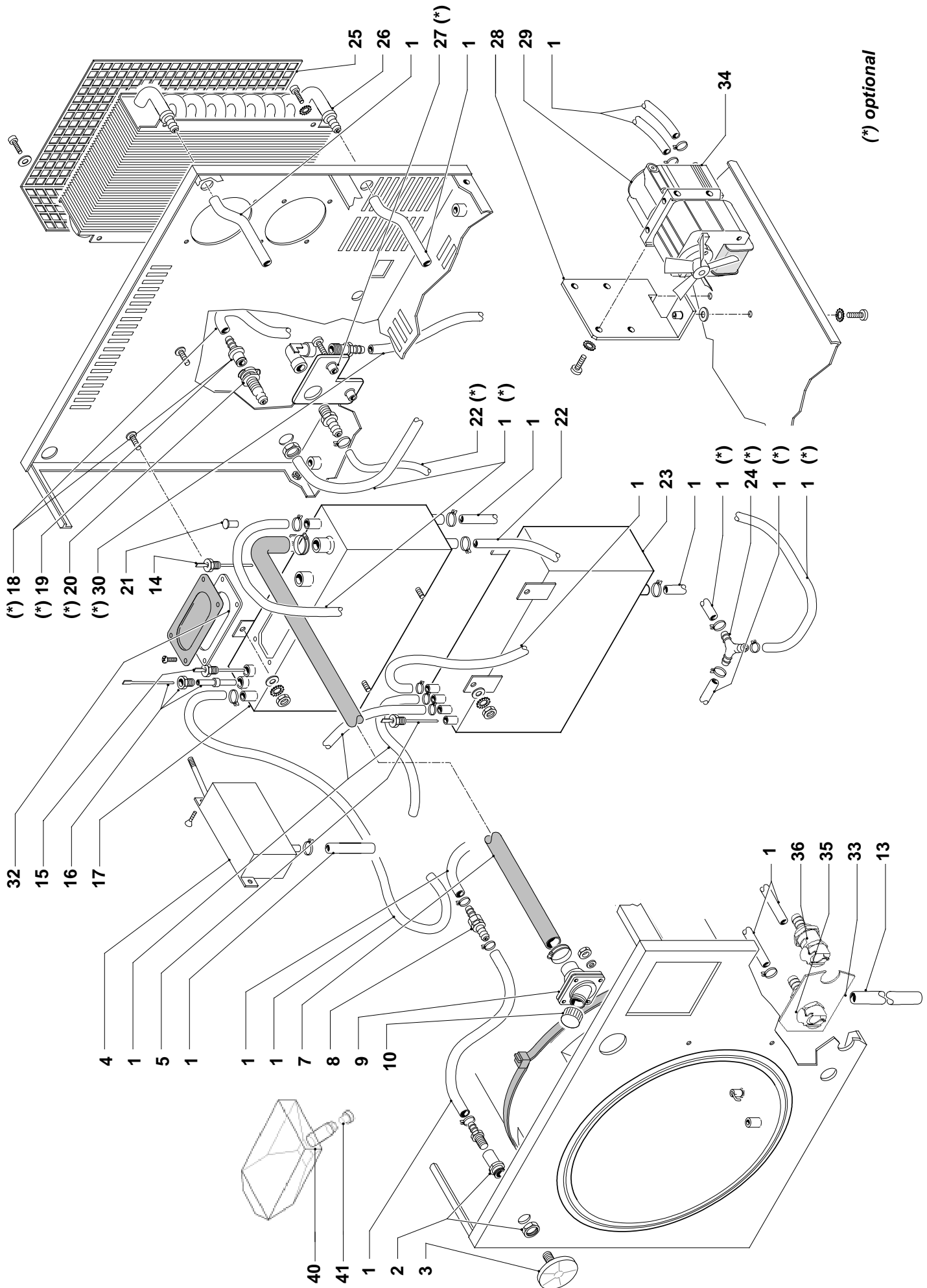

(*) optional

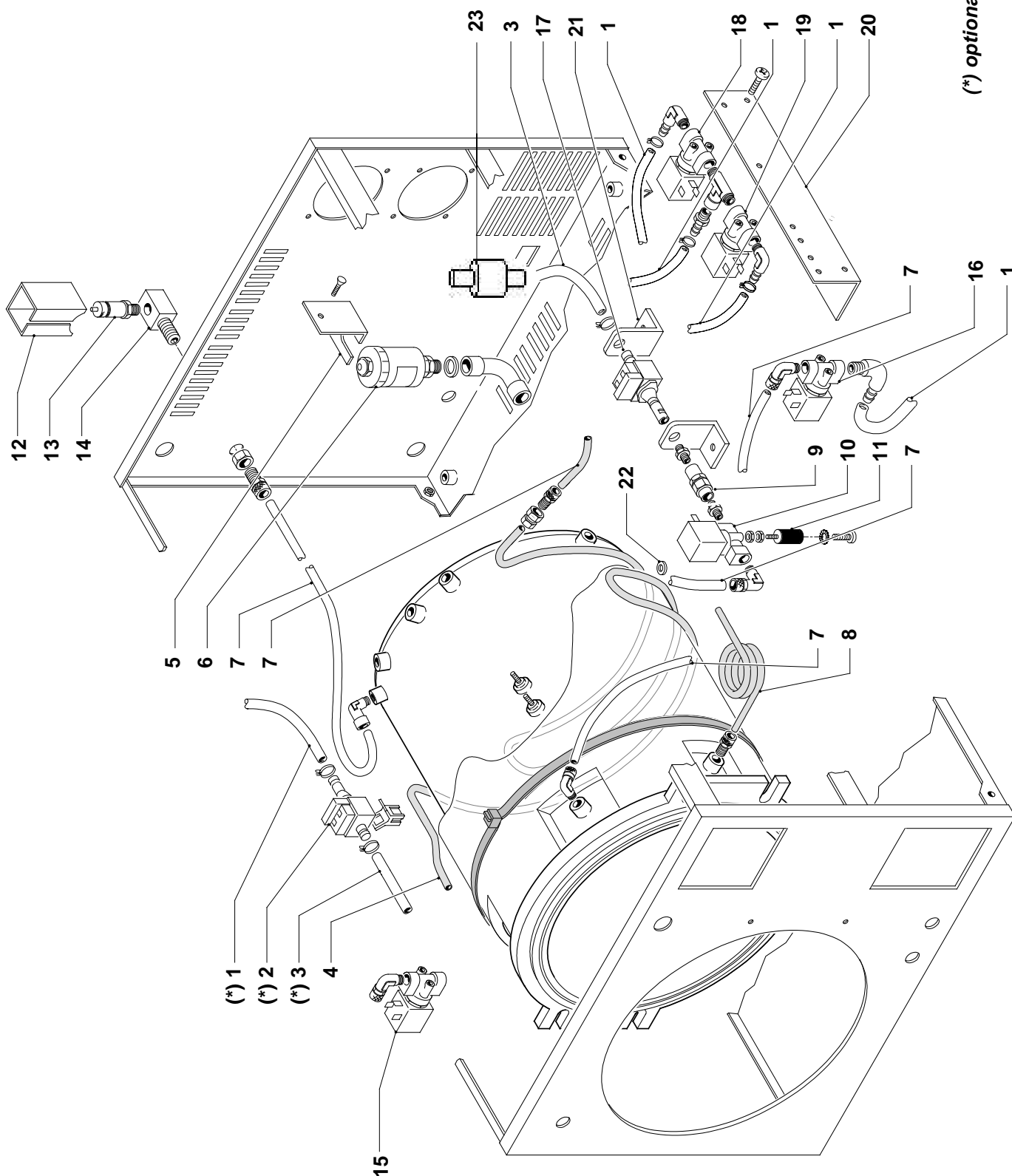


(*) optional on 18S - 18B

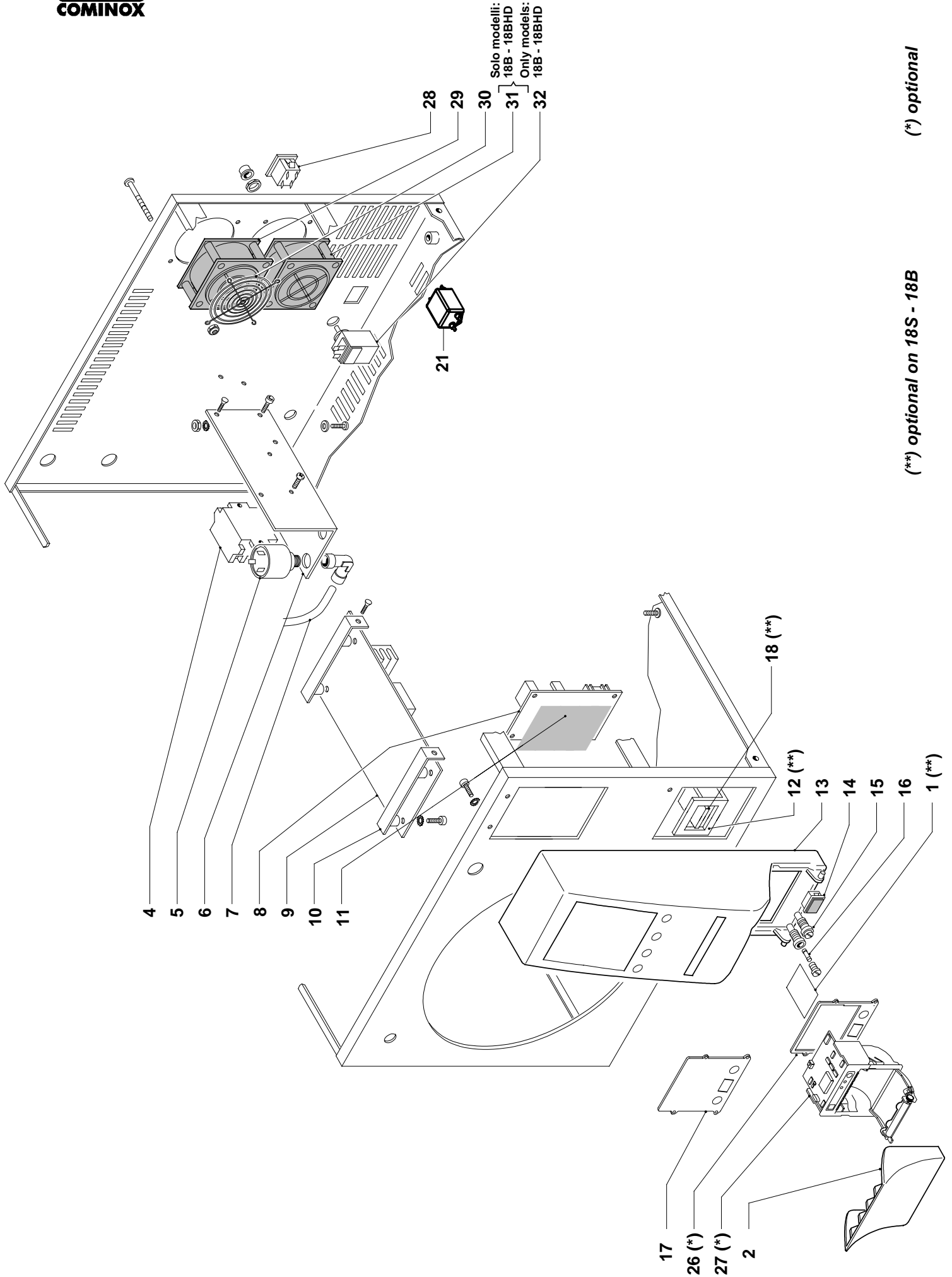

(*) optional

(**) optional on 18S - 18B

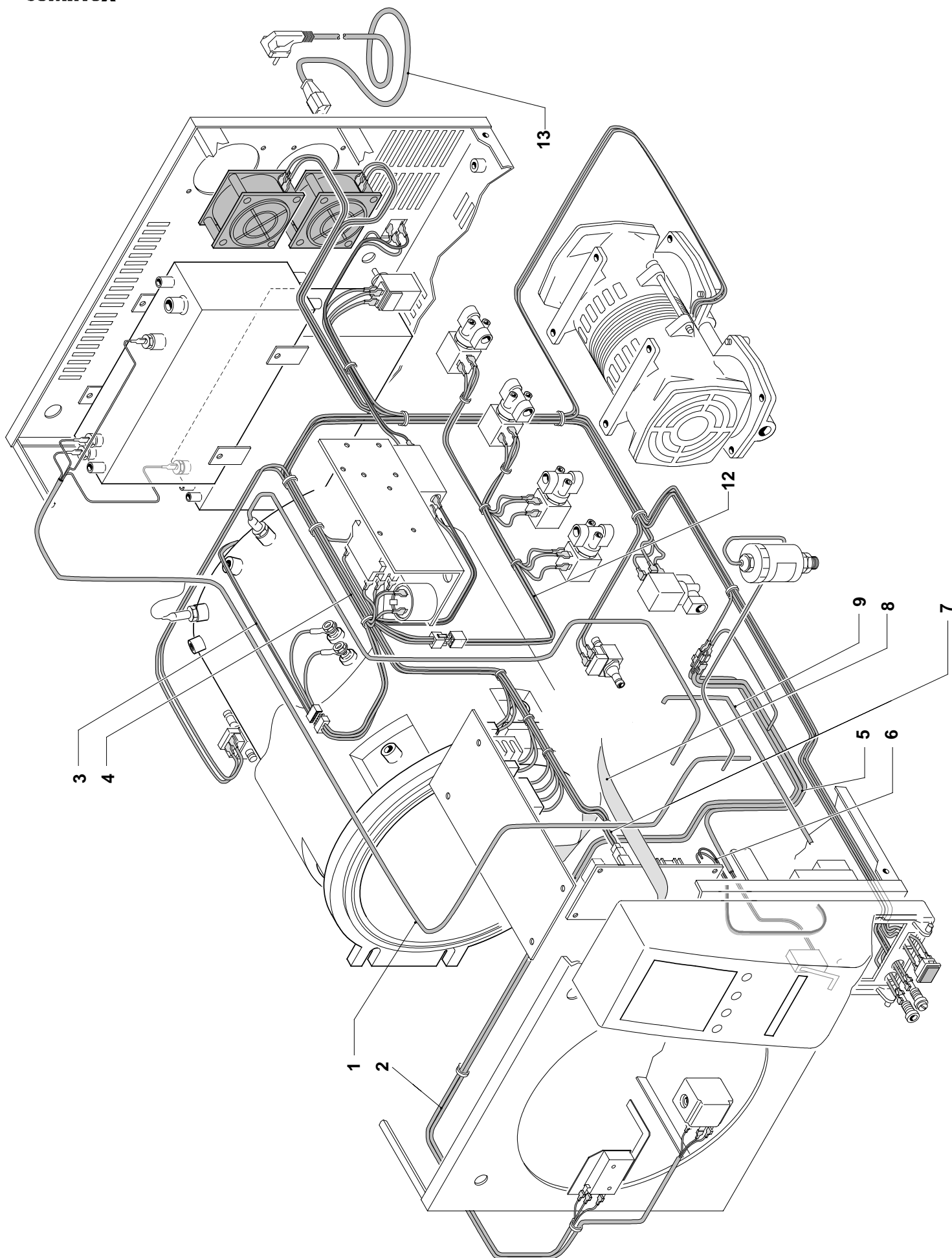

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|--|---|---|---|--|------------|-----------|------|
| A001 S-B BHD | 1 | GRATA COPERTURA RESISTENZA 18 LCD 927.000.006 | COIL COVERING GRID 18 LCD DIS. 927.000.006 | COIL COVERING GRID 18 LCD DIS. 927.000.006 | GRILLE COUVERTURE RESISTANCE 18 LCD 927.000.006 | ABDECKGITTER WIDERSTAND 18 LCD 927.000.006 | XGTC0211 | 37,00 | |
| A001 S-B BHD | 2 | GUARNIZIONE GRATA COPERT RESISTENZA RICAMBIO | COIL COVERING GRID SEAL SPARE PART | COIL COVERING GRID SEAL SPARE PART | JOINT GRILLE DE COUVERTURE RESISTANCE RECHANGE | DICHT. ABDECKGITTER WIDERSTAND ERSATZTEIL | X012GTC115 | 21,50 | |
| A001 S-B BHD | 3 | SUPPORTO VASSOI 3+5 18 LCD DIS. 927.000.004 | TRAY SUPPORT 3+5 18 LCD DIS. 927.000.004 | TRAY SUPPORT 3+5 18 LCD DIS. 927.000.004 | SUPPORT PLATEAUX 3+5 18 LCD DIS. 927.000.004 | TABLETTSTÄNDER 3+5 18 LCD DIS. 927.000.004 | XACC0136 | 50,00 | |
| A001 S-B BHD | 4 | VASSOIO IMBUTITO 15/18 DIS. 901.000.033 | DRAWN TRAY 15/18 DIS. 901.000.033 | DRAWN TRAY 15/18 DIS. 901.000.033 | PLATEAUX EMBOUTISSE 15/18 DIS. 901.000.033 | TABLETT TIEFZIEHEN 15/18 DIS. 901.000.033 | X010ACC002 | 15,00 | |
| A001 S-B BHD | 5 | GUARNIZIONE CAMERA STER 0R 81025 SIL NERO 60 Sh | CHAMBER SEAL 0R 81025 SIL NERO 60 Sh | CHAMBER SEAL 0R 81025 SIL NERO 60 Sh | JOINT CHAMBRE 0R 81025 SIL NERO 60 Sh | DICHTUNG DER KAMMER 0R 81025 SIL NERO 60 Sh | XGTC0203 | 10,00 | |
| A001 S-B BHD | 7 | TERMOSTATO SICUREZZA TIPO LS1 TEMP INTERV 245° | SAFETY THERMOSTAT TYPE LS1 TRIPPING TEMP 245° | SAFETY THERMOSTAT TYPE LS1 TRIPPING TEMP 245° | THERMOSTAT SECURITE TYPE LS1 TEMP D'INTERV 245° | SICHERHEITSTHERMOSTAT TYP LS1 ANSPRECHTEMP. 245° | XGEE0217 | 25,50 | |
| A001 S-B BHD | 8 | PIASTRA FISSAGGIO RESISTENZA 18 DIS. 914.013.017 | COIL FITTING PLATE 18 DIS 914.013.017 | COIL FITTING PLATE 18 DIS 914.013.017 | PLATINE DE FIXAGE RESIST 18 DIS 914.013.017 | BEFESTIGUNGSPLATTE WID. 18 DIS 914.013.017 | XGTC0237 | 23,00 | |
| A001 S-B BHD | 9 | RESISTENZA INTERNA 18 2000W 230V RICAMBIO | INTERNAL COIL 18 2000W 230V SPARE PART | INTERNAL COIL 18 2000W 230V SPARE PART | RESISTANCE INTERNE 18 2000W 230V RECHANGE | INTERNER WIDERSTAND 18 2000W 230V ERSATZTEIL | XGTC0101 | 42,00 | |
| A001 S-B BHD | 10 | PIEDINO REGOLABILE M8x40 RICAMBIO | ADJUSTABLE FEET M8x40 SPARE PART | ADJUSTABLE FEET M8x40 SPARE PART | PIETEMENT REGLABLE M8x40 RECHANGE | VERSTELLBARES FÜSSCHEN M8x40 ERSATZTEIL | X000GTC104 | 10,00 | |
| A001 S-B BHD | 12 | TELAIO 18 LCD DIS. 927.001.000 | FRAME 18 LCD DIS. 927.001.000 | FRAME 18 LCD DIS. 927.001.000 | CADRE 18 LCD DIS. 927.001.000 | RAHMEN 18 LCD DIS. 927.001.000 | XGTC0159 | 181,00 | |
| A001 S-B BHD | 13 | RESIST. EST. 15/18 700W 230V 901.004.016 + FASC. | EXT. COIL 15/18 700W 230V 901.004.016 + CLAMP | EXT. COIL 15/18 700W 230V 901.004.016 + BAND. | RESIST. EXT. 15/18 700W 230V 901.004.016 + BAND. | EXT. WID. 15/18 700W 230V 901.004.016 + SCHELLE | XGTC0018 | 88,00 | |
| A001 S-B BHD | 14 | MATERASSINO ISOLANTE CALD 18 DIS. 914.003.008-D | BOILER INSULATING COATING 18 DIS. 914.003.008 D | BOILER INSULATING COATING 18 DIS. 914.003.008 D | MATELAS ISOLANT CHAUDIERE 18 DIS. 914.003.008-D | ISOLIERMATTE HEIZUNG 18 DIS. 914.003.008-D | XGTC0081 | 15,00 | |
| A001 S-B BHD | 15 | FASCETTA A STRAPPO 1000x12,6 NYLON NERO FA 5343 | TEARING CLAMP 1000x12,6 NYLON BLACK FA 5343 | TEARING CLAMP 1000x12,6 NYLON BLACK FA 5343 | BANDEL. A COLLIER 1000x12,6 NYLON NOIR FA 5343 | SCHELLE 1000x12,6 NYLON SCHWARZ FA 5343 | XGTC0069 | 3,50 | |
| A001 S-B BHD | 16 | SONDA LIVELLO SPIEDINO CAM STERIL 18/24 RICAMBIO | STERILISING CHAMBER LEVEL PROBE 18 SPARE PART | STERILISING CHAMBER LEVEL PROBE 18 SPARE PART | SONDE NIVEAU CHAMBRE STERILISATION 18 RECHANGE | KAMMER-SONDE 18 ERSATZTEIL | XGTC0220 | 50,00 | 10 |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|--------------|-----|--|--|---|--|------------|-----------|------|
| A001 S-B BHD | 16 | SONDA LIVELLO STAMPATA RICAMBIO | INJECTED LEVEL PROBE SPARE PART | SONDE NIVEAU CHAMBRE STERILISATION INJECTE RECHANGE | EINSPRITZEN KAMMER-SONDE ERSATZTEIL | XGTC0191 | 23,00 | 11 |
| A001 S-B BHD | 21 | SENSORE TEMPERATURA CAMERA STERILIZZAZ PT 1000 | STERILISATION CHAMBER TEMPERATURE SENSOR PT 1000 | CAPTEUR TEMPERATURE CHAMBRE STERILISAT. PT 1000 | TEMPERATURSENSOR KAMMER PT 1000 | XGTC0005 | 50,00 | 14 |
| A001 S-B BHD | 22 | FILTRO SCARICO CAMERA STERILIZZAZ 18 PREMONTATO | PREASSEMBLED STERIL. CHAMBER DRAINING FILTER 18 | FILTRE VIDANGE CHAMBRE STERILISAT 18 PREASSEMBLE | ABFLUSSFILTER KAMMER 18 VORMONTAGE | XGTC0103 | 9,00 | |
| A001 S-B BHD | 24 | CAMERA STERILIZZAZ IMBUT 18 BHD-B-S LCD PREMONT | STERILISING CHAMBER 18 BHD-B-S LCD | CHAMBRE DE STERILISATION 18 BHD-B-S LCD | STERILISIERKAMMER 18 BHD-B-S LCD | XGTC0199 | 661,00 | |
| A001 S-B BHD | 25 | MANIGLIA PER VASSOI DIS. 901.003.000 | TRAY HANDLE DIS. 901.003.000 | POIGNEE POUR PLATEAUX DIS. 901.003.000 | TABLETTGRIFF DIS. 901.003.000 | X000ACC001 | 9,00 | |
| A002 S-B BHD | 1 | SUPPORTO SCUDO 18/24 DIS. 914.002.019 | DOOR UNIT SUPPORT 18/24 DIS. 914.002.019 | SUPPORT PORTE 18/24 DIS. 914.002.019 | TRÄGERPROFIL F ABSCHIRMUNG 18/24 DIS 914.002.019 | XGPO0074 | 14,50 | |
| A002 S-B BHD | 2 | COLONNINA CERNIERA SUPERIORE DIS. 914.002.006-A | UPPER HINGE SUPPORT DIS. 914.002.006-A | SUPPORT CHARNIERE SUPERIEURE DIS. 914.002.006-A | OBERES SCHARNIERELEMENT DIS. 914.002.006-A | XGPO0040 | 26,50 | |
| A002 S-B BHD | 3 | TRAVE SUPER PORTELLO ELTEK 18/24 914.002.026-C | UPPER DOOR SUPPORT ELTEK 18/24 914.002.026-C | ELEMENT SUPP SUP PORTE ELTEK 18/24 914.002.026-C | OBERE QUERLEISTE F TÜR ELTEK 18/24 914.002.026-C | XGPO0112 | 39,00 | |
| A002 S-B BHD | 4 | MICROINTERRUT TELAIO AH715358 18/24 PREMONTATO | PREASSEMBLED FRAME MICRO-SWITCH AH715358 18/24 | MICRO-INTERR. CADRE AH715358 18/24 PRE-ASSEMBLE | MIKROSCHALTER RAHMEN AH715358 18/24 VORMONTAGE | XGEE0198 | 3,50 | |
| A002 S-B BHD | 5 | MICROINTERRUT TRAVE PORT AH715358 18/24 PREMONT | PREASSEMBL DOOR SUPP MICRO-SWITCH AH715358 18/24 | MICRO-INT SUPP PORTE AH715358 18/24 PRE-ASSEMBLE | MIKROSCH. QUERLEISTE TÜR AH715358 18/24 VORMONT. | XGEE0189 | 4,00 | |
| A002 S-B BHD | 6 | MOLLA BUSSOLA PORTEL CAR MED 12,5x6,3x32 B13-032 | DOOR SLEEVE SPRING MED. LOAD 12,5x6,3x32 B13-032 | RESSORT DOUILLE PORTE CH MOY 12,5x6,3x32 B13-032 | FEDER BUCHSE TÜR MED LAD 12,5x6,3x32 B13-032 | XGPO0060 | 6,50 | |
| A002 S-B BHD | 7 | REGGISPINTA PORTELLO DIS. 914.002.005-A | DOOR THRUST BLOCK DIS. 914.002.005-A | BUTEE D'EMBRAYAGE PORTE DIS. 914.002.005-A | DRUCKLAGER TÜR DIS. 914.002.005-A | XGPO0070 | 27,50 | |
| A002 S-B BHD | 8 | PERNO CERNIERA 18/24 DIS. 914.002.010 | HINGE STUD 18/24 DIS. 914.002.010 | CHEVILLE CHARNIERE 18/24 DIS. 914.002.010 | SCHARNIERSTIFT 18/24 DIS. 914.002.010 | XGPO0043 | 4,50 | |
| A002 S-B BHD | 10 | PROTEZIONE LATER. CERNIERE 18 DIS 914.001.007-B | HINGE SIDE PROTECTION 18 DIS 914.001.007-B | PROTECTION LATER CHARNIERES 18 DIS 914.001.007-B | SEITENSCHUTZ SCHARNIER 18 DIS 914.001.007-B | XGPO0048 | 23,50 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|--|---|---|--|----------|-----------|------|
| A002 S-B BHD | 11 | TRAVE INFER PORTELLO ELTEK 18/24 914.002.027 | DOOR LOWER SUPPORT ELTEK 18/24 914.002.027 | ELEMENT SUPP INF PORTE ELTEK 18/24 914.002.027 | UNTERE QUERLEISTE TÜR ELTEK 18/24 914.002.027 | XGPO0113 | 39,00 | |
| A002 S-B BHD | 12 | SUPPORTO INFERIORE SCUDO 18/24 DIS. 914.002.017 | DOOR UNIT LOWER SUPPORT 18/24 DIS. 914.002.017 | SUPPORT INF ELEMENT PORTE 18/24 DIS. 914.002.017 | UNTERER TRÄGER ABSCHIRMUNG 18/24 DIS 914.002.017 | XGPO0073 | 17,00 | |
| A002 S-B BHD | 13 | GANCIO CON LEVA 18/24 DIS. 914.004.006-C | LEVER HOOK 18/24 DIS. 914.004.006-C | CROCHET AVEC LEVIER 18/24 DIS. 914.004.006-C | HAKEN MIT HEBEL 18/24 DIS. 914.004.006-C | XGPO0054 | 22,00 | |
| A002 S-B BHD | 14 | COLONNINA CERNIERA INFERIORE DIS. 914.002.007- A | LOWER HINGE SUPPORT DIS. 914.002.007-A | SUPPORT CHARNIERE INFERIEURE DIS. 914.002.007-A | UNTERES SCHARNIERELEMENT DIS. 914.002.007-A | XGPO0041 | 26,50 | |
| A002 S-B BHD | 15 | MANIGLIA PORTELLO 18/24 RAL9023 DIS. 914.002.024 | DOOR HANDLE 18/24 RAL9023 DIS. 914.002.024 | POIGNEE PORTE 18/24 RAL9023 DIS. 914.002.024 | TÜRGRIF 18/24 RAL9023 DIS. 914.002.024 | XGPO0052 | 9,50 | |
| A002 S-B BHD | 16 | PERNO MICROINTERRUT. PORTELLO DIS.914.002.014- A | DOOR MICRO-SWITCH STUD DIS.914.002.014-A | CHEVILLE MICRO- INTERRUPT PORTE DIS.914.002.014-A | STIFT MIKROSCHALTER TÜR DIS.914.002.014-A | XGPO0044 | 4,00 | |
| A002 S-B BHD | 17 | SCUDO PORTELLO 18/24 NCS 4030 RICAMBIO | DOOR UNIT 18/24 NCS 4030 SPARE PART | ELEMENT DE LA PORTE 18/24 NCS 4030 RECHANGE | ABSCHIRMUNG TÜR 18/24 NCS 4030 ERSATZTEIL | XGPO0076 | 50,00 | 5 |
| A002 S-B BHD | 17 | SCUDO PORTELLO 18/24 RAL7047 RICAMBIO | DOOR UNIT 18/24 RAL7047 SPARE PART | ELEMENT DE LA PORTE 18/24 RAL7047 RECHANGE | ABSCHIRMUNG TÜR 18/24 RAL7047 ERSATZTEIL | XGPO0099 | 50,00 | 6 |
| A002 S-B BHD | 18 | COPERCHIO TELAIO 18 LCD DIS. 927.001.010 | FRAME COVER 18 LCD DIS. 927.001.010 | COUVERTURE DU CADRE 18 LCD DIS. 927.001.010 | RAHMENABDECKUNG 18 LCD DIS. 927.001.010 | XGTC0202 | 54,50 | |
| A002 S-B BHD | 19 | PANNELLO INTERNO SCUDO 18/24 DIS. 914.002.013-D | DOOR UNIT INTERNAL PANEL 18/24 DIS 914.002.013- D | PANNEAU INTERNE PORTE 18/24 DIS. 914.002.013-D | INNENPANEEL ABSCHIRMUNG 18/24 DIS. 914.002.013-D | XGPO0047 | 38,00 | |
| A002 S-B BHD | 20 | SUPPORTO SUPERIORE SCUDO 18/24 DIS. 914.002.018 | DOOR UNIT UPPER SUPPORT 18/24 DIS. 914.002.018 | SUPPORT SUP ELEMENT PORTE 18/24 DIS. 914.002.018 | OBERER TRÄGER ABSCHIRMUNG 18/24 DIS. 914.002.018 | XGPO0072 | 14,50 | |
| A002 S-B BHD | 21 | ASTINA TERMOATTUAT BLOCCO PORT DIS 914.002.032 | DOOR LOCK THERMOACTUATOR ROD DIS 914.002.032 | TIGE ACTIONNEUR THERM BLOC PORTE DIS 914.002.032 | THERMOEFFEKTORSTIFT TÜRBLOCKIER. DIS 914.002.032 | XGPO0109 | 2,50 | |
| A002 S-B BHD | 22 | TERMOATTUATORE A TRAZIONE ELTEK RICAMBIO | TRACTION THERMOACTUATOR ELTEK SPARE PART | ACTIONNEUR THERMIQUE A TRACTION ELTEK RECHANGE | ZUG-THERMOEFFEKTOR ELTEK ERSATZTEIL | XGEE0185 | 38,50 | |
| A002 S-B BHD | 23 | MOLLA TERMOATTUAT BLOCCO PORTEL DIS 914.002.028 | DOOR LOCK THERMOACTUATOR SPRING DIS 914.002.028 | RESSORT ACTIONN THERM BLOC PORTE DIS 914.002.028 | THERMOEFFEKTORFEDER TÜRBLOCKIER. DIS 914.002.028 | XGPO0107 | 2,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|---|---|---|---|------------|-----------|------|
| A002 S-B BHD | 24 | DISTANZIALE TRAVE DIS. 914.002.009 | SUPPORT SPACER DIS. 914.002.009 | ENTRETOISE DE SUPPORT DIS. 914.002.009 | DISTANZSTÜCK QUERLEISTE DIS. 914.002.009 | XGPO0069 | 8,00 | |
| A002 S-B BHD | 25 | DISTANZIALE GANCI DIAM. 10 DIS. 914.004.002 | HOOK SPACER, DIAMETER 10 DIS. 914.004.002 | ENTRETOISE CROCHETS DIAMETRE 10 DIS. 914.004.002 | DISTANZSTÜCK HAKEN DURCHM. 10 DIS. 914.004.002 | XGPO0068 | 7,50 | |
| A002 S-B BHD | 27 | PERNO CERNIERA 18/24 DIS. 914.002.010 | HINGE STUD 18/24 DIS. 914.002.010 | CHEVILLE CHARNIERE 18/24 DIS. 914.002.010 | SCHARNIERSTIFT 18/24 DIS. 914.002.010 | XGPO0043 | 4,50 | |
| A002 S-B BHD | 28 | MOLLA A TRAZIONE GANCIO DIS. 914.002.001 | HOOK STRESS SPRING DIS. 914.002.001 | RESSORT A TRACTION CROCHET DIS. 914.002.001 | ZUGFEDER HAKEN DIS. 914.002.001 | XGPO0036 | 4,00 | |
| A002 S-B BHD | 29 | MOLLA A TORSIONE GANCIO DIS. 914.002.002-C | HOOK TWIST SPRING DIS. 914.002.002-C | RESSORT A TORSION CROCHET DIS. 914.002.002- C | DREHUNGSFEDER DIS. 914.002.002-C | XGPO0037 | 4,50 | |
| A002 S-B BHD | 30 | RINVIO GANCIO TRAVE 18/24 DIS.914.004.003-A | HOOK-SUPPORT TRANSMISS. 18/24 DIS 914.004.003-A | RENVOI CROCHET- SUPPORT 18/24 DIS.914.004.003-A | VORGEL. HAKEN- QUERLEISTE 18/24 DIS.914.004.003-A | XGPO0049 | 15,50 | |
| A002 S-B BHD | 32 | DISTANZIALE GANCI DIAM. 14 DIS. 914.004.001 | HOOK SPACER, DIAMETER 14 DIS. 914.004.001 | ENTRETOISE CROCHETS DIAMETRE 14 DIS. 914.004.001 | DISTANZSTÜCK HAKEN DURCHM. 14 DIS. 914.004.001 | XGPO0067 | 10,00 | |
| A002 S-B BHD | 33 | SPINA GANCIO DIS. 914.004.004-A | HOOK DRIVE DIS. 914.004.004-A | POUSSEE CROCHET DIS. 914.004.004-A | STIFT HAKEN DIS. 914.004.004-A | XGPO0066 | 4,50 | |
| A002 S-B BHD | 34 | PERNO COLONNINA GANCIO DIS. 914.002.011 | HOOK SUPPORT STUD DIS. 914.002.011 | CHEVILLE SUPPORT CROCHET DIS. 914.002.011 | BOLZEN HAKENELEMENT DIS. 914.002.011 | XGPO0065 | 3,00 | |
| A002 S-B BHD | 35 | COLONNINA GANCIO DIS. 914.002.008-A | HOOK SUPPORT DIS. 914.002.008-A | SUPPORT CROCHET DIS. 914.002.008-A | HAKENELEMENT DIS. 914.002.008-A | XGPO0064 | 25,50 | |
| A002 S-B BHD | 36 | BUSSOLA COLONNINA GANCIO DIS. 914.002.012 | HOOK SUPPORT SLEEVE DIS. 914.002.012 | DOUILLE SUPPORT CROCHET DIS. 914.002.012 | BUCHSE HAKENELEMENT DIS. 914.002.012 | XGPO0038 | 4,50 | |
| A002 S-B BHD | 37 | PORTELLO ALLUMINIO IMBUTITO OSSIDATO 18/24 | ALUMINIUM DOOR 18/24 | PORTE ALUMINIUM 18/24 | ALUMINIUM TÜR 18/24 | XGPO0175 | 89,50 | |
| A002 S-B BHD | 38 | BUSSOLA SUPPORTO PORTEL ALLUM 18/24 914.015.003 | ALUMINIUM DOOR SUPPORT SLEEVE 18/24 914.015.003 | DOUILLE SUPPORT PORTE ALUMINIUM 18/24 914.015.003 | BUCHSE ALUMINIUM TÜRHALTERUNG 18/24 914.015.003 | XGPO0185 | 11,00 | |
| A002 S-B BHD | 40 | GANCIO 18/24 DIS. 914.004.005-B | HOOK 18/24 DIS. 914.004.005- B | CROCHET 18/24 DIS. 914.004.005-B | HAKEN 18/24 DIS. 914.004.005-B | XGPO0053 | 11,00 | |
| A002 S-B BHD | 42 | RINVIO GANCIO TRAVE 18/24 DIS.914.004.003-A | HOOK-SUPPORT TRANSMISS. 18/24 DIS 914.004.003-A | RENVOI CROCHET- SUPPORT 18/24 DIS.914.004.003-A | VORGEL. HAKEN- QUERLEISTE 18/24 DIS.914.004.003-A | XGPO0049 | 15,50 | |
| A003 B- BHD | 1 | TUBO SILICONE 6x11 | SILICONE PIPE 6x11 | TUYAU AU SILICONE 6x11 | SILIKONROHR 6x11 | X000GCS121 | 7,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|------------|-----|--|---|---|--|------------|-----------|------|
| A003 B-BHD | 2 | SUPPORTO FILTRO ARIA 18 RICAMBIO | AIR FILTER SUPPORT 18 SPARE PART | SUPPORT FILTRE DE L'AIR 18 RECHANGE | TRÄGER LUFTFILTER 18 ERSATZTEIL | XV00GVT102 | 18,00 | |
| A003 B-BHD | 3 | FILTRO ARIA 0,2 MICRON CAT 2000/35 | AIR FILTER 0.2 MICRONS CAT 2000/35 | FILTRE DE L'AIR 0,2 MICRONS CAT 2000/35 | LUFTFILTER 0,2 MICRON CAT 2000/35 | XGVT0004 | 7,50 | |
| A003 B-BHD | 4 | SERBATOIO CONDENSA 18 LCD DIS. 927.000.001 | CONDENSATION TANK 18 LCD DIS. 927.000.001 | RESERVOIR CONDENSAT 18 LCD DIS. 927.000.001 | KONDENSWSSERTANK 18 LCD DIS. 927.000.001 | XGCS0082 | 34,00 | |
| A003 B-BHD | 5 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 B-BHD | 7 | TUBO GOMMA SERB ACQUA PULITA DIS. 914.000.002 | CLEAN WATER TANK RUBBER PIPE DIS. 914.000.002 | TUYAU CAOUTCH RESERV EAU PROPRE DIS 914.000.002 | SCHLAUCH TANK REINES WASSER DIS. 914.000.002 | XGCS0024 | 10,00 | |
| A003 B-BHD | 8 | VALVOLA NON RITORNO DIS. 901.018.000 PREMONTATA | PREASSEMBLED CHECK VALVE DIS. 901.018.000 | SOUPAPE DE RETENUE DIS. 901.018.000 PRE-ASSEMBLE | RÜCKSCHLAGVENTIL DIS. 901.018.000 VORMONTAGE | X000GIM111 | 19,00 | |
| A003 B-BHD | 9 | BOCCHETTONE DI CARICO PREMONTATO | PREASSEMBLED INLET FILLER | BUSE DE CHARGEMENT PRE-ASSEMBLE | EINFÜLLSTUTZEN VORMONTAGE | X000GCS015 | 14,00 | |
| A003 B-BHD | 10 | TAPPO BOCCHETTONE CARICO LSI018 | INLET FILLER COVER LSI018 | BOUCHON DU BUSE DE CHARGEMENT LSI018 | KAPPE EINFÜLLSTUTZEN LSI018 | X000GCS014 | 2,50 | |
| A003 B-BHD | 13 | TUBO SCARICO 7x12x800 RICAMBIO | DRAIN PIPE 7x12x800 SPARE PART | TUYAU DE VIDANGE 7x12x800 RECHANGE | ABFLUSSROHR 7x12x800 ERSATZTEIL | X000ACC013 | 16,00 | |
| A003 B-BHD | 14 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 B-BHD | 15 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 B-BHD | 16 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 B-BHD | 17 | SERBATOIO ACQUA PULITA 18 LCD DIS. 927.005.000 | CLEAN WATER TANK 18 LCD DIS. 927.005.000 | RESERVOIR DE L'EAU PROPRE 18 LCD DIS. 927.005.000 | TANK REINES WASSER 18 LCD DIS. 927.005.000 | XGCS0080 | 76,50 | |
| A003 B-BHD | 18 | TUBO SCARICO DIRETTO 7x12x2000 RICAMBIO | STRAIGHT DRAIN PIPE 7x12x2000 SPARE PART | TUYAU DE VIDANGE DIRECT 7x12x2000 RECHANGE | DIREKTABFLUSS 7x12x2000 ERSATZTEIL | XACC0027 | 21,00 | |
| A003 B-BHD | 19 | INNESTO DIRITTO RUBIN SCAR RAP PLC 220-05 BIANCO | STRAIGHT JOINT RAPID DRAIN TAP PLC 220-05 WHITE | CONNEX DROITE ROBIN VIDANGE RAP PLC 220-05 BLANC | GER. EINSCH. SCHNELL-ABFLUSSHAHN PLC220-05 WEISS | XGCS0026 | 4,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|------------|-----|---|--|--|--|------------|-----------|------|
| A003 B-BHD | 20 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05 colore BIANCO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05 WHITE | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05 BLANC | SCHNELL-ABFLUSSSHAHN PLCD 160-05 WEISS | XGCS0025 | 21,50 | |
| A003 B-BHD | 22 | TUBO SILICONE 4x8 | SILICONE PIPE 4x8 | TUYAU EN SILICONE | SILIKONROHR 4x8 | X000GCS112 | 4,50 | |
| A003 B-BHD | 23 | SERBATOIO RECUP ACQUA USATA 18 LCD 927.006.000 | DIRTY WATER RECOVERY TANK 18 LCD 927.006.000 | RESERVOIR RECUPER. EAU SALE 18 LCD 927.006.000 | AUFFANGTANK VERBR. WASSER 18 LCD 927.006.000 | XGCS0081 | 69,00 | |
| A003 B-BHD | 24 | RACCORDO "Y" NYLON PORTAGOMMA TUBO 8 mm. | "Y"-SHAPED JOINT NYLON HOSE CONNECTOR 8 mm. PIPE | JOINT EN « Y » NYLON SERRE TUYAU 8 mm. | HOSENROHR NYLON ROHR 8 mm. | X000GPO025 | 4,50 | |
| A003 B-BHD | 25 | PROTEZIONE CONDENSATORE 18/24 LCD 926.000.004 | CONDENSER PROTECTION 18/24 LCD 926.000.004 | CONDENSATEUR 18/24 LCD 926.000.004 | KONDENSATOR-SCHUTZ 18/24 LCD 926.000.004 | XGCS0061 | 12,60 | |
| A003 B-BHD | 26 | CONDENSATORE 18/24 DIS. 914.006.001-A | CONDENSER 18/24 DIS. 914.006.001-A | CONDENSATEUR 18/24 DIS. 914.006.001-A | KONDENSATOR 18/24 DIS. 914.006.001-A | XGCS0023 | 51,00 | |
| A003 B-BHD | 27 | PIASTRINA CARICO AUTOM ACQUA DIS. 914.001.016-A | WATER SELF CHARGE PLATE DIS. 914.001.016-A | PLAQUETTE REMPLISS. AUTOM. EAU DIS 914.001.016-A | PLATTCH. AUTOM. WASSERAUFFÜLL. DIS 914.001.016-A | XGTC0123 | 8,50 | |
| A003 B-BHD | 28 | POMPA VUOTO 20 LT 2119VDCU 18 230 V | 20 LITRE VACUUM PUMP 2119VDCU 18 230 V | POMPE A VIDE 20 LITRES 2119VDCU 18 230 V | VAKUUM-PUMPE 20 LIT. 2119VDCU 18 230 V | XGVT0045 | 323,00 | 12 |
| A003 B-BHD | 29 | ANTIVIBRANTE FF 15X20 M4 60Sh | VIBRATION-DAMPING UNIT F- F 15X20 M4 60Sh | DISPOSITIF CONTRE VIBRATIONS F-F 15X20 M4 60Sh | SCHWINGUNGSDÄMPFER FF 15X20 M4 60Sh | XGVT0019 | 3,50 | |
| A003 B-BHD | 30 | TUBO CARICO AUTOMATICO ACQUA 7x12x2000 RICAMBIO | WATER SELF CHARGE PIPE 7x12x2000 SPARE PART | TUYAU CHARG AUTOM EAU PROPRE 7x12x2000 RECHANGE | AUTOM. WASSERAUFFÜLLUNGSSCH LAUCH 7x12x2000 ERS. | XACC0028 | 19,50 | |
| A003 B-BHD | 32 | GUARNIZ COPERCHIO SERB ACQUA PUL 914.007.004 | GASKET FOR CLEAN WATER TANK LID 914.007.004 | GARNITURE REGARD RESERV. EAU PROPRE 914.007.004 | DICHTUNG TANKKAPPE REINES WASSER 914.007.004 | XGCS0045 | 4,00 | |
| A003 B-BHD | 33 | PIASTRINA RUBIN SCARICO 18LCD DIS. 927.001.005 | DRAIN TAP FIXING PLATE 18LCD DIS. 927.001.005 | PLAQUETTE FIXATION ROBINETS VIDANGE 18LCD DIS. 927.001.005 | BEFESTIGUNGSPLATTE ABFLUSSHÄHNE 18LCD DIS. 927.001.005 | XGTC0160 | 4,50 | |
| A003 B-BHD | 34 | KIT POMPA VUOTO 20 LT. 2119 | 20 LITRE VACUUM PUMP KIT 2119 | KIT POMPE A VIDE 20 LITRES 2119 | VAKUUM-PUMPE 20 LIT. KIT 2119 | XGVT0059 | 136,00 | |
| A003 B-BHD | 35 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05 colore BIANCO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05 WHITE | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05 BLANC | SCHNELL-ABFLUSSSHAHN PLCD 160-05 WEISS | XGCS0025 | 21,50 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|------------|-----|--|---|--|--|------------|-----------|------|
| A003 B-BHD | 36 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05BLK COL. NERO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05BLK BLACK | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05BLK NOIR | SCHNELL-ABFLUSSHAHN PLCD 160-05BLK SCHWARZ | XGCS0050 | 21,50 | |
| A003 B-BHD | 40 | IMBUTO MISURATORE DIS. 914.000.001 | MEASURING FUNNEL DIS. 914.000.001 | ENTONNOIR MESUREUR DIS. 914.000.001 | MESSTRICHTER DIS. 914.000.001 | XACC0021 | 5,50 | |
| A003 B-BHD | 41 | TAPPO PER IMBUTO MISURATORE | COVER FOR MEASURING FUNNEL | BOUCHON POUR ENTONNOIR MESUREUR | DECKEL FÜR MESSTRICHTER | XACC0077 | 1,00 | |
| A003 S | 1 | TUBO SILICONE 6x11 | SILICONE PIPE 6x11 | TUYAU AU SILICONE 6x11 | SILIKONROHR 6x11 | X000GCS121 | 7,00 | |
| A003 S | 2 | SUPPORTO FILTRO ARIA 18 RICAMBIO | AIR FILTER SUPPORT 18 SPARE PART | SUPPORT FILTRE DE L'AIR 18 RECHANGE | TRÄGER LUFTFILTER 18 ERSATZTEIL | XV00GVT102 | 18,00 | |
| A003 S | 3 | FILTRO ARIA 0,2 MICRON CAT 2000/35 | AIR FILTER 0.2 MICRONS CAT 2000/35 | FILTRE DE L'AIR 0,2 MICRONS CAT 2000/35 | LUFTFILTER 0,2 MICRON CAT 2000/35 | XGVT0004 | 7,50 | |
| A003 S | 4 | SERBATOIO CONDENSA 18 LCD DIS. 927.000.001 | CONDENSATION TANK 18 LCD DIS. 927.000.001 | RESERVOIR CONDENSAT 18 LCD DIS. 927.000.001 | KONDENSWASSERTANK 18 LCD DIS. 927.000.001 | XGCS0082 | 34,00 | |
| A003 S | 5 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 S | 7 | TUBO GOMMA SERB ACQUA PULITA DIS. 914.000.002 | CLEAN WATER TANK RUBBER PIPE DIS. 914.000.002 | TUYAU CAOUTCH RESERV EAU PROPRE DIS 914.000.002 | SCHLAUCH TANK REINES WASSER DIS. 914.000.002 | XGCS0024 | 10,00 | |
| A003 S | 8 | VALVOLA NON RITORNO DIS. 901.018.000 PREMONTATA | PREASSEMBLED CHECK VALVE DIS. 901.018.000 | SOUPAPE DE RETENUE DIS. 901.018.000 PRE-ASSEMBLE | RÜCKSCHLAGVENTIL DIS. 901.018.000 VORMONTAGE | X000GIM111 | 19,00 | |
| A003 S | 9 | BOCCHETTONE DI CARICO PREMONTATO | PREASSEMBLED INLET FILLER | BUSE DE CHARGEMENT PRE-ASSEMBLE | EINFÜLLSTUTZEN VORMONTAGE | X000GCS015 | 14,00 | |
| A003 S | 10 | TAPPO BOCCHETTONE CARICO LSI018 | INLET FILLER COVER LSI018 | BOUCHON DU BUSE DE CHARGEMENT LSI018 | KAPPE EINFÜLLSTUTZEN LSI018 | X000GCS014 | 2,50 | |
| A003 S | 13 | TUBO SCARICO 7x12x800 RICAMBIO | DRAIN PIPE 7x12x800 SPARE PART | TUYAU DE VIDANGE 7x12x800 RECHANGE | ABFLUSSROHR 7x12x800 ERSATZTEIL | X000ACC013 | 16,00 | |
| A003 S | 14 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 S | 15 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |
| A003 S | 16 | SONDA LIVELLO SERBATOIO 18 LUNGH 160 mm RICAMBIO | TANK LEVEL PROBE 18 LENGTH 160 mm SPARE PART | SONDE NIVEAU RESERVOIR 18 LONG. 160 mm RECHANGE | TANKSONDE 18 LÄNGE 160 mm ERSATZTEIL | X000GCS118 | 16,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|--------|-----|--|--|---|--|------------|-----------|------|
| A003 S | 17 | SERBATOIO ACQUA PULITA 18 LCD DIS. 927.005.000 | CLEAN WATER TANK 18 LCD DIS. 927.005.000 | RESERVOIR DE L'EAU PROPRE 18 LCD DIS. 927.005.000 | TANK REINES WASSER 18 LCD DIS. 927.005.000 | XGCS0080 | 76,50 | |
| A003 S | 18 | TUBO SCARICO DIRETTO 7x12x2000 RICAMBIO | STRAIGHT DRAIN PIPE 7x12x2000 SPARE PART | TUYAU DE VIDANGE DIRECT 7x12x2000 RECHANGE | DIREKTABFLUSS 7x12x2000 ERSATZTEIL | XACC0027 | 21,00 | |
| A003 S | 19 | INNESTO DIRITTO RUBIN SCAR RAP PLC 220-05 BIANCO | STRAIGHT JOINT RAPID DRAIN TAP PLC 220-05 WHITE | CONNEX DROITE ROBIN VIDANGE RAP PLC 220-05 BLANC | GER. EINSCH. SCHNELL-ABFLUSSHAHN PLC220-05 WEISS | XGCS0026 | 4,00 | |
| A003 S | 20 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05 colore BIANCO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05 WHITE | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05 BLANC | SCHNELL-ABFLUSSHAHN PLCD 160-05 WEISS | XGCS0025 | 21,50 | |
| A003 S | 21 | TAPPO PER IMBUTO MISURATORE | METERING FUNNEL COVER | BOUCHON POUR ENTONNOIR DE DOSAGE | MESSTRICHTERKAPPE | XACC0077 | 1,00 | |
| A003 S | 22 | TUBO SILICONE 4x8 | SILICONE PIPE 4x8 | TUYAU EN SILICONE | SILIKONROHR 4x8 | X000GCS112 | 4,50 | |
| A003 S | 23 | SERBATOIO RECUP ACQUA USATA 18 LCD 927.006.000 | DIRTY WATER RECOVERY TANK 18 LCD 927.006.000 | RESERVOIR RECUPER. EAU SALE 18 LCD 927.006.000 | AUFFANGTANK VERBR. WASSER 18 LCD 927.006.000 | XGCS0081 | 69,00 | |
| A003 S | 24 | RACCORDO "Y" NYLON PORTAGOMMA TUBO 8 mm. | "Y"-SHAPED JOINT NYLON HOSE CONNECTOR 8 mm. PIPE | JOINT EN « Y » NYLON SERRE TUYAU 8 mm. | HOSENROHR NYLON ROHR 8 mm. | X000GPO025 | 4,50 | |
| A003 S | 25 | PROTEZIONE CONDENSATORE 18/24 LCD 926.000.004 | CONDENSER PROTECTION 18/24 LCD 926.000.004 | PROTECTION CONDENSATEUR 18/24 LCD 926.000.004 | KONDENSATOR-SCHUTZ 18/24 LCD 926.000.004 | XGCS0061 | 12,60 | |
| A003 S | 26 | CONDENSATORE 18/24 DIS. 914.006.001-A | CONDENSER 18/24 DIS. 914.006.001-A | CONDENSATEUR 18/24 DIS. 914.006.001-A | KONDENSATOR 18/24 DIS. 914.006.001-A | XGCS0023 | 51,00 | |
| A003 S | 27 | PIASTRINA CARICO AUTOM ACQUA DIS. 914.001.016-A | WATER SELF CHARGE PLATE DIS. 914.001.016-A | PLAQUETTE REMPLISS. AUTOM. EAU DIS 914.001.016-A | PLATTCH. AUTOM. WASSERAUFFÜLL. DIS 914.001.016-A | XGTC0123 | 8,50 | |
| A003 S | 28 | SUPPORTO POMPA MONOTESTA 18 DIS. 914.000.003-A | SINGLE-HEAD PUMP SUPPORT 18 DIS. 914.000.003-A | SUPP POMPE A UNE SEULE TETE 18 DIS 914.000.003-A | EINKOPF-PUMPENTRÄGER 18 DIS. 914.000.003-A | XGVT0021 | 16,50 | |
| A003 S | 29 | POMPA VUOTO 7 LT. MONOTESTA 7006 | SINGLE-HEAD 7 LITRE VACUUM PUMP 7006 | POMPE A VIDE 7 LITRES A UNE SEULE TETE 7006 | EINKOPF-VAKUUM-PUMPE 7 LIT. 7006 | XGVT0020 | 183,00 | |
| A003 S | 30 | TUBO CARICO AUTOMATICO ACQUA 7x12x2000 RICAMBIO | WATER SELF CHARGE PIPE 7x12x2000 SPARE PART | TUYAU CHARG AUTOM EAU PROPRE 7x12x2000 RECHANGE | AUTOM. WASSERAUFFÜLLUNGSSCH LAUCH 7x12x2000 ERS. | XACC0028 | 19,50 | |
| A003 S | 32 | GUARNIZ COPERCHIO SERB ACQUA PUL 914.007.004 | GASKET FOR CLEAN WATER TANK LID 914.007.004 | GARNITURE REGARD RESERV. EAU PROPRE 914.007.004 | DICHTUNG TANKKAPPE REINES WASSER 914.007.004 | XGCS0045 | 4,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|--------------|-----|--|--|--|--|------------|-----------|------|
| A003 S | 33 | PIASTRINA RUBIN SCARICO 18LCD DIS. 927.001.005 | DRAIN TAP FIXING PLATE 18LCD DIS. 927.001.005 | PLAQUETTE FIXATION ROBINETS VIDANGE 18LCD DIS. 927.001.005 | BEFESTIGUNGSPLATTE ABFLUSSHÄHNE 18LCD DIS. 927.001.005 | XGTC0160 | 4,50 | |
| A003 S | 34 | KIT POMPA VUOTO 7 LT. MONOTESTA 7006 | SINGLE-HEAD 7 LITRE VACUUM PUMP KIT 7006 | KIT POMPE A VIDE 7 LITRES A UNE SEULE TETE 7006 | EINKOPF-VAKUUM-PUMPE 7 LT. KIT 7006 | XGVT0030 | 89,00 | |
| A003 S | 35 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05 colore BIANCO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05 WHITE | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05 BLANC | SCHNELL-ABFLUSSSHAHN PLCD 160-05 WEISS | XGCS0025 | 21,50 | |
| A003 S | 36 | RUBINETTO SCAR RAPIDO PLCD 160-05BLK COL. NERO | RAPID DRAIN TAP PLCD 160-05BLK BLACK | ROBINET DE VIDANGE RAPIDE PLCD 160-05BLK NOIR | SCHNELL-ABFLUSSSHAHN PLCD 160-05BLK SCHWARZ | XGCS0050 | 21,50 | |
| A003 S | 40 | IMBUTO MISURATORE DIS. 914.000.001 | MEASURING FUNNEL DIS. 914.000.001 | ENTONNOIR MESUREUR DIS. 914.000.001 | MESSTRICHTER DIS. 914.000.001 | XACC0021 | 5,50 | |
| A003 S | 41 | TAPPO PER IMBUTO MISURATORE | COVER FOR MEASURING FUNNEL | BOUCHON POUR ENTONNOIR MESUREUR | DECKEL FÜR MESSTRICHTER | XACC0077 | 1,00 | |
| A004 S-B BHD | 1 | TUBO SILICONE 6x11 | SILICONE PIPE 6x11 | TUYAU AU SILICONE 6x11 | SILIKONROHR 6x11 | X000GCS121 | 7,00 | |
| A004 S-B BHD | 2 | POMPA IMMISSIONE ACQUA EX5 | WATER INLET PUMP EX5 | POMPE CHARGEMENT DE L'EAU EX5 | EINFÜLLPUMPE EX5 | XGIM0103 | 30,60 | |
| A004 S-B BHD | 3 | TUBO SILICONE 4x8 | SILICONE PIPE 4x8 | TUYAU EN SILICONE | SILIKONROHR 4x8 | X000GCS112 | 4,50 | |
| A004 S-B BHD | 4 | SERPENTINA INGRESSO ARIA 18 LCD 927.000.003 | AIR INLET COIL 18 LCD 927.000.003 | RESISTANCE ENTREE EAU 18 LCD 927.000.003 | BELÜFTUNGSSERPENTINE 18 LCD 927.000.003 | XGTC0207 | 21,50 | |
| A004 S-B BHD | 5 | SUPPORTO TRASDUTTORE PRESS. 18 DIS. 914.001.014 | PRESSURE TRANSDUCER SUPPORT 18 DIS. 914.001.014 | SUPPORT TRANSDUCTEUR PRESSION 18 DIS 914.001.014 | HALTER DRUCKGEBER 18 DIS. 914.001.014 | XGTC0078 | 8,50 | |
| A004 S-B BHD | 6 | TRASDUTTORE DI PRESS VB TIPO 501 ST-501815101041 0-4 bar | PRESSURE TRANSDUCER VB 501 ST-501815101041 0-4 bar | TRANSDUCTEUR DE PRESSION VB 501 ST-501815101041 0-4 bar | DRUCKGEBER VB 501 ST-501815101041 0-4 bar | XGIM0005 | 166,00 | 9 |
| A004 S-B BHD | 6 | TRASDUTTORE DI PRESS M91443 0-5 bar | PRESSURE TRANSDUCER M91443 0-5 bar | TRANSDUCTEUR DE PRESSION M91443 0-5 bar | DRUCKGEBER M91443 0-5 bar | XGIM0113 | 95,00 | 9 |
| A004 S-B BHD | 7 | TUBO TEFLON 6x8 | TEFLON PIPE 6x8 | TUYAU EN TEFLON 6x8 | TEFLONSCHLAUCH 6x8 | X000GIM011 | 11,50 | |
| A004 S-B BHD | 8 | SERPENTINA TRASDUTTORE PRESS DIA 4 18 RICAMBIO | PRESSURE TRANSDUCER COIL DIAM. 4 18 SPARE PART | RESIST TRANSDUCTEUR PRESSION DIAM 4 18 RECHANGE | SERPENTINE DRUCKGEBER DURCHM. 4 18 ERSATZTEIL | XGIM0067 | 15,50 | |
| A004 S-B BHD | 9 | VALVOLA NON RITORNO DIS. 914.011.000 PREMONTATA | PREASSEMBLED CHECK VALVE DIS. 914.011.000 | SOUPAPE DE RETENUE DIS. 914.011.000 PRE-ASSEMBLE | RÜCKSCHLAGVENTIL DIS. 914.011.000 VORMONTAGE | XGIM0025 | 17,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|---|--|--|---|------------|-----------|------|
| A004 S-B BHD | 10 | ELETTROVALVOLA N.C. 4,5 mm. 2 VIE 1/8" BOBINA F | SOLENOID VALVE N.C. 4,5 mm. 2 WAY 1/8" COIL F | SOUPAPE SOLEN N.F. 4,5 mm. 2 VOIES 1/8" BOBINE F | ELEKTROVENTIL N.C. 4,5 mm. 2 WEG 1/8" SPULE F | X000GIM121 | 36,50 | |
| A004 S-B BHD | 11 | ANTIVIBRANTE FF 15X20 M4 60Sh | VIBRATION-DAMPING UNIT F F 15X20 M4 60Sh | DISPOSITIF CONTRE VIBRATIONS F-F 15X20 M4 60Sh | SCHWINGUNGSDÄMPFER FF 15X20 M4 60Sh | XGVT0019 | 3,50 | |
| A004 S-B BHD | 12 | SUPPORTO VALVOLA SICUREZZA DIS. 922.000.001-A | SAFETY VALVE SUPPORT DIS. 922.000.001-A | SUPPORT SOUPAPE DE SECURITE DIS. 922.000.001-A | SCHUTZ SICHERHEITSVENTIL DIS. 922.000.001-A | XGIM0083 | 10,00 | |
| A004 S-B BHD | 13 | VALVOLA DI SICUREZZ 260 kPa VAP ACQUEO SAT 3/8" | SAFETY VALVE 260 kPa SATURATED WATER STEAM 3/8" | SOUPAPE SECURITE 260 kPa VAPEUR EAU SATUREE 3/8" | SICHERHEITSVENTIL 260 kPa DAMPF GESÄTTIGT 3/8" | XGIM0023 | 23,00 | |
| A004 S-B BHD | 14 | RACCORDO VALVOLA DI SICUREZZA DIS. 901.000.031-B | SAFETY VALVE JOINT DIS. 901.000.031-B | JOINT SOUPAPE DE SECURITE DIS. 901.000.031-B | ANSCHLUSS SICHERHEITSVENTIL DIS. 901.000.031-B | X000GIM001 | 8,50 | |
| A004 S-B BHD | 15 | ELETTROVALVOLA N.C. 4,5 mm. 2 VIE 1/8" BOBINA F | SOLENOID VALVE N.C. 4,5 mm. 2 WAY 1/8" COIL F | SOUPAPE SOLEN N.F. 4,5 mm. 2 VOIES 1/8" BOBINE F | ELEKTROVENTIL N.C. 4,5 mm. 2 WEG 1/8" SPULE F | X000GIM121 | 36,50 | |
| A004 S-B BHD | 16 | ELETTROVALVOLA N.A. 3 mm. 2 VIE 1/8" BOBINA F | SOLENOID VALVE N.O. 3 mm. 2 WAY 1/8" COIL F | SOUPAPE SOLEN N.O. 3 mm. 2 VOIES 1/8" BOBINE F | ELEKTROVENTIL N.O. 3 mm. 2 WEG 1/8" SPULE F | X000GIM117 | 54,00 | |
| A004 S-B BHD | 17 | POMPA IMMISSIONE ACQUA EX5 | WATER INLET PUMP EX5 | POMPE ENTREE LIQUIDE EX5 | EINFÜLLPUMPE EX5 | XGIM0103 | 30,60 | |
| A004 S-B BHD | 18 | ELETTROVALVOLA N.A. 4,5 mm. 2 VIE 1/8" BOBINA F | SOLENOID VALVE N.O. 4,5 mm. 2 WAY 1/8" COIL F | SOUPAPE SOLEN N.O. 4,5 mm. 2 VOIES 1/8" BOBINE F | ELEKTROVENTIL N.O. 4,5 mm. 2 WEG 1/8" SPULE F | X000GIM119 | 54,00 | |
| A004 S-B BHD | 19 | ELETTROVALVOLA 3 VIE U. 3 mm. 1/8" BOBINA F | SOLENOID VALVE 3 WAYS U. 3 mm. 1/8" COIL F | SOLENOÏDE 3 VOIES U. 3 mm. 1/8" BOBINE F | 3-WEGE-VENTIL U. 3 mm. 1/8" SPULE F | XV00GIM118 | 51,00 | |
| A004 S-B BHD | 20 | SUPPORTO ELETTROVAL 18LCD/24LCD S-B 927.001.009 | SOLEN. VALVE SUPPORT 18LCD/24LCD S-B 927.001.009 | SUPPORT SOLENOÏDE 18LCD/24LCD S-B 927.001.009 | ELEKTROVENTIL-HALTER. 18LCD/24LCD S-B 927.001.009 | XGIM0094 | 13,50 | |
| A004 S-B BHD | 21 | ANTIVIBRANTE A SQUADRA POMPA 801022 | VIBRATION-DAMPING UNIT "L" SHAPE PUMP 801022 | DISPOSITIF CONTRE VIBRAT. A "L" POMPE 801022 | WINKEL- SCHWINGUNGSDÄMPFER PUMPE 801022 | X012GIM105 | 2,00 | |
| A004 S-B BHD | 22 | RIDUTTORE DI PORTATA 18 DIS. 914.000.011 | FLOW REDUCER 18 DIS. 914.000.011 | REDUCTEUR DE DEBIT 18 DIS. 914.000.011 | TRANSFORMAT. FUER WASSERMENGE 18 DIS 914.000.011 | XGIM0034 | 3,50 | |
| A004 S-B BHD | 23 | FILTRO SERBATOIO ACQUA PULITA | CLEAN WATER TANK FILTER | FILTRE RESERVOIR DE L'EAU PROPRE | TANK REINES WASSER FILTER | XGIM0098 | 4,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|---|--|--|--|------------|-----------|------|
| A005 S-B BHD | 1 | STERILCARD AMMINISTRATORE | STERILCARD ADMINISTRATOR | STERILCARD ADMINISTRATEUR | ADMINISTRATOR- STERILCARD | XGEE0272 | 19,50 | |
| A005 S-B BHD | 1 | STERILCARD UTENTE | STERILCARD USER | STERILCARD OPERATEUR | BENUTZER-STERILCARD | XGEE0271 | 19,50 | |
| A005 S-B BHD | 2 | SPORTellino STAMPANTE NCS4030 DIS 914.009.006 | PRINTER DOOR NCS4030 DIS 914.009.006 | PORTE IMPRIMANTE NCS4030 DIS 914.009.006 | KLAPPE FÜR DRUCKER NCS4030 DIS 914.009.006 | XGEE0100 | 5,50 | 5 |
| A005 S-B BHD | 2 | SPORTellino STAMPANTE RAL 7047 DIS. 914.009.006 | PRINTER DOOR RAL 7047 DIS 914.009.006 | PORTE IMPRIMANTE RAL 7047 DIS 914.009.006 | KLAPPE FÜR DRUCKER RAL 7047 DIS 914.009.006 | XGEE0127 | 5,00 | 6 |
| A005 S-B BHD | 4 | CONTATTORE COD. 3TG1001-1AL2 | CONTACTOR COD. 3TG1001- 1AL2 | CONTACTEUR COD. 3TG1001-1AL2 | SCHÜTZ COD. 3TG1001-1AL2 | X000GEE117 | 26,00 | |
| A005 S-B BHD | 5 | PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO 5612/VAP-DR | ELECTRO-MECHANICAL PRESSURE SWITCH 5612/VAP-DR | PRESSOSTAT ELECTROMECHANIQUE 5612/VAP-DR | ELEKTROMECHANISCHER DRUCKWÄCHTER 5612/VAP- DR | XH00GIM001 | 21,50 | |
| A005 S-B BHD | 6 | SUPPORTO COMPONENTI ELETTRICI 18LCD 927.001.003 | ELECTRIC COMPONENT SUPPORT 18LCD 927.001.003 | SUPPORT ELEMENTS ELECTRIQ. 18LCD 927.001.003 | HALT. ELEKTRO- KOMPONENTEN 18LCD 927.001.003 | XGEE0243 | 12,00 | |
| A005 S-B BHD | 7 | TUBO TEFLON 6x8 | TEFLON PIPE 6x8 | TUYAU EN TEFLON 6x8 | TEFLONSCHLAUCH 6x8 | X000GIM011 | 11,50 | |
| A005 S-B BHD | 8 | SCHEDE ELETTRONICA DI LOGICA LCD | LOGIC ELECTRONIC BOARD LCD | FICHE ELECTRONIQUE LOGIQUE LCD | LOGISCHE ELEKTRONIKKARTE LCD | XGEE0225 | 194,00 | 13 |
| A005 S-B BHD | 9 | SCHEDE ELETTRONICA DI POTENZA LCD | POWER ELECTRONIC BOARD LCD | FICHE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE LCD | ELEKTRONISCHE LEISTUNGSKARTE LCD | XGEE0221 | 161,00 | 13 |
| A005 S-B BHD | 10 | SUPPORTO SCHEDE ELETTRO POTEN 18LCD 927.001.004 | POWER ELECTRONIC BOARD SUPPORT 18LCD 927.001.004 | SUPPORT FICHE ELECTRON. PUISS. 18LCD 927.001.004 | HALTER. ELEKTR. LEISTUNGSKARTE 18LCD 927.001.004 | XGEE0242 | 12,50 | |
| A005 S-B BHD | 11 | DISPLAY SCATOLA COMANDI 18/24 LCD | CONTROL BOX DISPLAY 18/24 LCD | AFFICHEUR BOITE DE COMMANDES 18/24 LCD | DISPLAY SCHALTGEHÄUSE 18/24 LCD | XGEE0226 | 99,00 | |
| A005 S-B BHD | 12 | SUPPORTO LETTORE SMART CARD DIS.927.002.003 | SMART CARD READER SUPPORT DIS.927.002.003 | SUPPORT LECTEUR SMART CARD DIS.927.002.003 | SMART CARD LESEGERÄT STÄNDER DIS.927.002.003 | XGEE0246 | 9,00 | |
| A005 S-B BHD | 13 | SCATOLA COMANDI 18/24 LCD NCS 4030 RICAMBIO | CONTROL BOX 18/24 LCD NCS 4030 SPARE PART | BOITE DES COMMANDES 18/24 LCD NCS 4030 RECHANGE | SCHALTGEHÄUSE 18/24 LCD NCS 4030 ERSATZTEIL | XGEE0251 | 35,50 | 5 |
| A005 S-B BHD | 13 | SCATOLA COMANDI 18/24 LCD RAL 7047 RICAMBIO | CONTROL BOX 18/24 LCD RAL 7047 SPARE PART | BOITE DES COMMANDES 18/24 LCD RAL 7047 RECHANGE | SCHALTGEHÄUSE 18/24 LCD RAL 7047 ERSATZTEIL | XGEE0283 | 36,50 | 6 |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|--|--|---|--|------------|-----------|------|
| A005 S-B BHD | 14 | INTERRUPTORE GENERALE 15/18/24/6 CEDV01VSL | TWO POLE CUT-OUT SWITCH 15/18/24/6 CEDV01VSL | INTERRUPTEUR GENERAL A DEUX POLES 15/18/24/6 CEDV01VSL | HAUPTSCHALTER 2-POLIG 15/18/24/6 CEDV01VSL | X000GEE116 | 5,50 | |
| A005 S-B BHD | 15 | PORTAFUSIBILE 6,3x32 16A 250V FX0417 + DADO | FUSE HOLDER 6,3x32 16A 250V FX0417 + NUT | PORTE FUSIBLES 6,3x32 16A 250V FX0417 + ECROU | SICHERUNGSHALTER 6,3x32 16A 250V FX0417 + MUTTER | XGEE0220 | 8,80 | |
| A005 S-B BHD | 16 | FUSIBILE 6x32 12 A "F" CF632312 | FUSE 6x32 12 A "F" CF632312 | FUSIBLE 6x32 12 A "F" CF632312 | SICHERUNG 6x32 12 A "F" CF632312 | XGEE0012 | 2,50 | |
| A005 S-B BHD | 17 | PIASTRA PORTAFUSIB- INTERRUT 18LCD 927.002.002 | PLATE FUSE HOLDER - SWITCH 18LCD 927.002.002 | PLATINE PORTE FUSIBLES - INTERRUPTEUR 18LCD 927.002.002 | PLATTE SICHERUNGSHALTER - HAUPTSCHALTER 18LCD 927.002.002 | XGEE0245 | 12,50 | |
| A005 S-B BHD | 18 | LETTORE SMART CARD | SMART CARD READER | LECTEUR SMART CARD | SMART CARD LESEGERÄT | XGEE0227 | 18,50 | |
| A005 S-B BHD | 21 | FILTRO ANTIDISTURBO TIPO 15SS4A-2DC2-Q | ANTI-JAMMING FILTER P/N 15SS4A-2DC2-Q | FILTRE ANTI-BROUILLAGE P/N 15SS4A-2DC2-Q | ENTSTÖRFILTER P/N 15SS4A-2DC2-Q | XGEE0265 | 30,00 | |
| A005 S-B BHD | 26 | PIASTRA PORTAFUS-INTER- STAMP 18LCD 927.002.001 | PLATE FUSE HOLDER - SWITCH - PRINTER 18LCD 927.002.001 | PLATINE PORTE FUSIBLES - INTERRUPTEUR - IMPRIMANTE 18LCD 927.002.001 | PLATTE SICHERUNGSHALTER - DRUCKER HAUPTSCHALTER 18LCD 927.002.001 | XGEE0244 | 12,50 | |
| A005 S-B BHD | 27 | STAMPANTE KF40-SP-5V | PRINTER KF40-SP-5V | IMPRIMANTE KF40-SP-5V | DRUCKER KF40-SP-5V | XGEE0263 | 260,00 | |
| A005 S-B BHD | 28 | PRESA CAVO ALIMENTAZIONE PX 575/15/63 | POWER SUPPLY CABLE SOCKET PX 575/15/63 | PRISE CABLAGE ALIMENTATION PX 575/15/63 | STECKDOSE STROMKABEL PX 575/15/63 | X012GEE002 | 8,00 | |
| A005 S-B BHD | 29 | VENTOLA 120X120X38 220 VAC | FAN 120X120X38 220 VAC | VENTILATEUR 120X120X38 220 VAC | LÜFTERRAD 120X120X38 220 VAC | XGEE0090 | 24,50 | |
| A005 S-B BHD | 30 | GRIGLIA METALLICA 120X120 PER VENTOLA | FAN METAL GRID 120X120 | GRILLE METALLIQUE 120X120 POUR VENTILATEUR | LÜFTERRADMETALLSCHUTZ ROST 120x120 | XGEE0103 | 5,50 | |
| A005 S-B BHD | 31 | VENTOLA 120X120X38 220 VAC | FAN 120X120X38 220 VAC | VENTILATEUR 120X120X38 220 VAC | LÜFTERRAD 120X120X38 220 VAC | XGEE0090 | 24,50 | |
| A005 S-B BHD | 32 | TERMOSTATO SICUREZZA TIPO LS1 TEMP INTERV 245° | SAFETY THERMOSTAT TYPE LS1 TRIPPING TEMP 245° | THERMOSTAT SECURITE TYPE LS1 TEMP D'INTERV 245° | SICHERHEITSTHERMOSTAT TYP LS1 ANSPRECHTEMP. 245° | XGEE0217 | 25,50 | |
| A006 S-B BHD | 1 | CABLAGGIO SCHEDA POTENZA - LIVELLI 18/24 LCD | POWER BOARD - LEVEL PROBE CABLING 18/24 LCD | CABLAGE CARTE DE PUISSANCE - SONDE DE NIVEAU 18/24 LCD | VERKABELUNG LEISTUNGSKARTE - STANDSONDE 18/24 LCD | XGEE0229 | 18,00 | |

| Tav | Pos | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Code | Price [€] | Note |
|-----------------|-----|--|---|---|---|----------|-----------|------|
| A006 S-B BHD | 2 | CABLAGGIO INTERNO SCUDO 18/24 RICAMBIO | INTERNAL DOOR UNIT CABLING 18/24 SPARE PART | CABLAGE INTERNE ELEMENT PORTE 18/24 RECHANGE | INNENKABELUNG ABSCHIRMUNG TÜR 18/24 ERSATZTEIL | XGEE0208 | 45,00 | |
| A006 S-B BHD | 3 | CABLAGGIO RESISTENZE 18 DIS. 914.000.014-A | COIL CABLING 18 DIS. 914.000.014-A | CABLAGE RESISTANCE 18 DIS. 914.000.014-A | VERKABELUNG WIDERSTAND 18 DIS. 914.000.014-A | XGEE0122 | 6,50 | |
| A006 S-B BHD | 4 | CABLAGGIO GENERALE 18/24 LCD | GENERAL CABLING 18/24 LCD | CABLAGE GENERAL 18/24 LCD | HAUPTVERKABELUNG 18/24 LCD | XGEE0232 | 64,00 | |
| A006 S-B BHD | 5 | CABLAGGIO SCHEDA POTENZA - MICRO 18/24 LCD | CABLING DOOR POWER BOARD - MICRO-SWITCH 18/24 LCD | CABLAGE CARTE DE PUISSANCE - MICRO- INTERR. 18/24 LCD | VERKABEL. LEISTUNGSKARTE - MIKROSCHALTER 18/24 LCD | XGEE0231 | 7,50 | |
| A006 S-B BHD | 6 | CABLAGGIO FLAT SCHEDA LOGICA - LETT SMART CARD | LOGIC BOARD - SMART CARD READER FLAT CABLING | CABLAGE PLAT CARTE LOGIQUE - LECTEUR SMART CARD | FLACH-VERKABELUNG LOGISCHEKARTE - SMART CARD LESEGERÄT | XGEE0258 | 17,00 | |
| A006 S-B BHD | 7 | CABLAGGIO SCHEDA LOGICA - PORTA SERIALE LCD | LOGIC BOARD - SERIAL PORT CABLING LCD | CABLAGE CARTE LOGIQUE - PORTE SERIELLE LCD | VERKABELUNG LOGISCHEKARTE - SERIELLE SCHNITTSTELLE LCD | XGEE0266 | 18,50 | |
| A006 S-B BHD | 8 | CABLAGGIO FLAT SCHEDA POTENZA - LOGICA 18/24LCD | POWER - LOGIC BOARD FLAT CABLING 18/24LCD | CABLAGE PLAT CARTE DE PUISSANCE - LOGIQUE 18/24LCD | FLACH-VERKABELUNG LEISTUNGSKARTE - LOGISCHEKARTE 18/24LCD | XGEE0228 | 15,00 | |
| A006 S-B BHD | 9 | CABLAGGIO SCHEDA POTENZA - STAMP KP-40 18/24 LCD | CABLING POWER BOARD - PRINTER KF40 18/24 LCD | CABLAGE CARTE DE PUISSANCE - IMPRIM. KF40 18/24 LCD | VERKABELUNG LEISTUNGSKARTE - DRUCKER KF40 18/24 LCD | XGEE0230 | 10,50 | |
| A006 S-B BHD | 12 | CABLAGGIO ELETTROVALVOLE 18/24 LCD | SOLENOID VALVE CABLING 18/24 LCD | CABLAGE ELECTROVANNES 18/24 LCD | VERKAB. ELEKTROVENTILE 18/24 LCD | XGEE0233 | 16,50 | |
| A006 S-B BHD | 13 | CAVO ELETTRICO DI ALIMENT ANG/ANG H5V310N025SAA | POWER SUPPLY CABLE ANG/ANG H5V310N025SAA | CABLE D'ALIMENTATION ANG/ANG H5V310N025SAA | STROMKABEL ANG/ANG H5V310N025SAA | XACC0048 | 11,50 | |

Note

- 5 Viola - Violet - Violet - Violet
- 6 Bianco - White - Blanc - Weiß
- 9 Identificare correttamente il trasduttore verificandone la scala di misura (0-4 bar oppure 0-5 bar)
- 10 Per raccordo GAS 1/8" - For joint GAS 1/8" (SN<13673, 13733-13820, 13901-13924)
- 11 Per raccordo GAS 1/4" - For joint GAS 1/4" (SN>13924, 13821-13900, 13673-13732)
- 12 La pompa 2119 non va montata al contrario - The pump 2119 must not be installed upside down
- 13 In caso di sostituzione, eseguire la taratura degli strumenti di misura come indicato nei paragrafi 3, 4 e 5 del capitolo MENU TECNICO del Service Manual oppure correggere l'indicazione di temperatura come indicato nel paragrafo 6 - In case of replacement, proceed with the calibration of the measuring instruments as described in the paragraphs 3, 4 and 5 of the chapter TECHNICIAN MENU of the Service Manual or adjust the indication of temperature as described in the paragraph 6
- 14 In caso di sostituzione, inserire nella sterilizzatrice il valore a 0°C riportato sull'etichetta o sul cavo come indicato nel paragrafo 5 del capitolo MENU TECNICO del Service Manual - In case of replacement, insert in the sterilizer the 0°C value indicated on the label or on the cable as described in the paragraph 5 of the chapter TECHNICIAN MENU of the Service Manual