

Ectodol

solución oftálmica

Ectodol® solución oftálmica

Lea detenidamente esta información antes de empezar a usar **Ectodol® solución oftálmica**. NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen información importante. Si tiene alguna duda acerca del uso de **Ectodol® solución oftálmica** consulte con su médico, farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas Instrucciones de Uso.

1. Qué es Ectodol® solución oftálmica y para qué se utiliza

Ectodol® solución oftálmica es un producto sanitario que contiene Ectoin®, una molécula de origen natural que protege las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana.

Ectodol® solución oftálmica es una solución isotónica para reducir la inflamación de la conjuntiva. Alivia los síntomas como ojos rojos, picor y ojos llorosos.

Ectodol® solución oftálmica favorece el proceso de regeneración de la conjuntiva irritada y sensible.

Ectodol® solución oftálmica es apto para niños y para ojos sensibles y es compatible con lentes de contacto.

2. Advertencias y precauciones

Ectodol® solución oftálmica no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad a Ectoin® o a cualquiera de los demás ingredientes de la solución oftálmica.

Ectodol® solución oftálmica puede utilizarse después de una cirugía ocular si se lo ha recomendado su médico o un profesional sanitario.

Si se produce una reacción alérgica, debe interrumpirse inmediatamente el uso de **Ectodol® solución oftálmica**.

Tras el uso de un envase, el líquido restante debe ser desechado. No está destinado para un uso posterior.

No use envases dañados o rotos.

3. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ectodol® solución oftálmica

No existen interacciones conocidas entre **Ectodol® solución oftálmica** y otros colirios o cremas oftálmicas.

Espera al menos 15 minutos después de usar **Ectodol® solución oftálmica** antes de aplicar otros productos sanitarios o medicamentos en el ojo.

4. Qué debe tenerse en cuenta durante el embarazo y la lactancia

Actualmente no hay información disponible sobre el uso de **Ectodol® solución oftálmica** durante el embarazo y la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este producto sanitario si:

- está embarazada o en periodo de lactancia
- no está segura de si está embarazada o no

5. Cómo usar Ectodol® solución oftálmica

Utilice siempre **Ectodol® solución oftálmica** según estas Instrucciones de Uso. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo.

Aplicar 1-2 gotas en cada ojo varias veces al día, a menos que su médico le indique lo contrario. Los niños de 10 años o menores deben recibir ayuda para la aplicación de **Ectodol® solución oftálmica**.

1. Separe un envase de la tira y ábralo girando la lengüeta.
2. Inclina la cabeza hacia atrás y con el dedo índice tire del párpado inferior hacia abajo mirando hacia arriba.

3. Apriete suavemente el envase con la otra mano y deje caer una o dos gotas en el saco conjuntival del ojo.
4. El envase no debe tocar el ojo. Cierre el ojo lentamente para dispersar la solución lo mejor posible.
5. Repita el procedimiento en el otro ojo.

6. Posibles efectos adversos de Ectodol® solución oftálmica

Ectodol® solución oftálmica presenta una buena tolerancia. Hasta la fecha no se conocen efectos adversos que aparezcan de forma frecuente o persistente.

En casos aislados, **Ectodol® solución oftálmica** puede producir temporalmente irritación ocular, hiperemia ocular o conjuntivitis.

Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor (detallado en estas Instrucciones de Uso), si nota algún efecto adverso que pueda estar asociado al uso de **Ectodol® solución oftálmica**.

Si la condición persiste o empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

7. Cómo conservar Ectodol® solución oftálmica

La fecha de caducidad de **Ectodol® solución oftálmica** está indicada en la caja y en el envase.

Ectodol® solución oftálmica no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada.

Ectodol® solución oftálmica debe conservarse entre 2 °C – 25 °C.

Ectodol® solución oftálmica contiene pequeñas piezas de plástico que pueden ser tragadas por niños pequeños. Peligro de asfixia. Por lo tanto, **Ectodol® solución oftálmica** debe mantenerse fuera del alcance de los niños.


8. Contenido de Ectodol® solución oftálmica e información adicional

30 envases monodosis de 0,5 ml.

Ingredientes

Ectoin®, hidroxietilcelulosa, cloruro de sodio, agua y tampón citrato.

9. Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la fabricación

 bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten (Alemania)

 0197

Distribuido en España por:

BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona (España)
www.brillpharma.com

10. Fecha de revision: Marzo 2017

 0197

Marcado CE con el número del Organismo Notificador



Fabricante



Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso

LOT

Número de lote



Por favor no utilice envases dañados o perforados



Limitación de temperatura

STERILE A

Producto estéril por filtración aséptica



Fecha de caducidad



Por favor deseché el líquido restante

 brill
P H A R M A