

Ectodol[®]

Spray nasal rinitis

Ectodol[®] spray nasal rinitis

Lea detenidamente esta información antes de empezar a usar **Ectodol[®] spray nasal rinitis**. NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen información importante. Si tiene alguna duda acerca del uso de **Ectodol[®] spray nasal rinitis** consulte con su médico, farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas Instrucciones de Uso.

1. Qué es Ectodol[®] spray nasal rinitis y para qué se utiliza

Ectodol[®] spray nasal rinitis es un producto sanitario que contiene Ectoin[®], una molécula de origen natural que protege las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana.

Ectodol[®] spray nasal rinitis puede usarse para el tratamiento y prevención de los síntomas de la rinitis o rinosinusitis.

Ectodol[®] spray nasal rinitis es una solución hipertónica y tiene un efecto descongestionante, ya que el producto extrae el exceso de agua del epitelio nasal sin deshidratar la nariz. Debido a este efecto, se puede mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias altas.

Las características protectoras y de reducción de los procesos inflamatorios de Ectoin[®] en combinación con la sal marina natural, alivian los síntomas del resfriado común (rinitis) y la inflamación de la cavidad sinusal (sinusitis).

Ectodol[®] spray nasal rinitis no contiene conservantes.

Ectodol[®] spray nasal rinitis es apto para niños y bebés a partir de 1 mes.

2. Advertencias y precauciones

- **Ectodol[®] spray nasal rinitis** no debe usarse después de una operación nasal o en caso de lesiones en la nariz.
- **Ectodol[®] spray nasal rinitis** no debe usarse en caso de hipersensibilidad a Ectoin[®] o a cualquiera de los demás ingredientes de este spray nasal.

- Si se produce una reacción alérgica, debe interrumpirse inmediatamente el uso de **Ectodol[®] spray nasal rinitis**.
- Para garantizar una higiene segura, cada envase debe ser utilizado por una sola persona.
- Tras la apertura del envase, no debe usarse más de 6 semanas.

3. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ectodol[®] spray nasal rinitis

No existen interacciones conocidas entre **Ectodol[®] spray nasal rinitis** y otros sprays nasales.

4. Qué debe tenerse en cuenta durante el embarazo y la lactancia

Actualmente no hay información disponible sobre el uso de **Ectodol[®] spray nasal rinitis** durante el embarazo y la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este producto sanitario si:

- está embarazada o en periodo de lactancia
- no está segura de si está embarazada o no.

5. Cómo usar Ectodol[®] spray nasal rinitis

Utilice siempre **Ectodol[®] spray nasal rinitis** según estas Instrucciones de Uso. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo.

Aplicar 1-2 pulverizaciones en cada fosa nasal varias veces al día, a menos que su médico le indique lo contrario. Los niños de 10 años o menores deben recibir ayuda de los padres para la aplicación de **Ectodol[®] spray nasal rinitis**.

Antes de usar **Ectodol[®] spray nasal rinitis** por primera vez, quite el tapón y presione el pulsador 2-3 veces para eliminar el aire. No corte la punta. Si no funciona correctamente (puede ocurrir si el envase no se encuentra en posición vertical), presione el pulsador varias veces manteniendo el envase en posición vertical.

1. Suéñese la nariz suavemente para limpiar las fosas nasales.
2. Retire el tapón del envase.
3. Sujete el envase con el dedo índice y el dedo medio, y la parte de abajo del envase con el pulgar. Inclíne ligeramente la cabeza hacia delante y tápese una fosa nasal presionando suavemente con el dedo.
4. Empiece a respirar suavemente por la fosa nasal que no tiene tapada.
5. Introduzca la punta del spray en la fosa nasal que no tiene tapada. Presione el pulsador de forma rápida y firmemente pulverice dentro de la fosa nasal. Continúe respirando suavemente por la fosa nasal.
6. Introduzca la punta del spray en la otra fosa nasal.
7. Repita los pasos descritos anteriormente para la otra fosa nasal.
8. Limpie la punta del envase con un paño limpio sin pelusas.
9. Coloque el tapón en el envase.

6. Posibles efectos adversos de Ectodol® spray nasal rinitis

Ectodol® spray nasal rinitis presenta una buena tolerancia. Hasta la fecha no se conocen efectos adversos que aparezcan de forma frecuente o persistente.

Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor (detallado en estas Instrucciones de Uso), si nota algún efecto adverso que pueda estar asociado al uso de **Ectodol® spray nasal rinitis**.

Si la condición persiste o empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

7. Cómo conservar Ectodol® spray nasal rinitis

La fecha de caducidad de **Ectodol® spray nasal rinitis** está indicada en la caja y en el envase.

Ectodol® spray nasal rinitis no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada.

Ectodol® spray nasal rinitis debe conservarse entre 2 °C – 25 °C.

Ectodol® spray nasal rinitis debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

8. Contenido de Ectodol® spray nasal rinitis e información adicional

Cada pulverización contiene 0,14 ml de solución.

Envase de 20 ml.

Ingredientes

Ectoín®, sal marina, tampón fosfato y agua.

9. Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la fabricación

 bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten (Alemania)

Distribuido en España por:

BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona (España)
www.brillpharma.com


10. Fecha de revision: Marzo 2017

Markado
CE 

Número
de lote 

Fabricante 

Fecha de
caducidad 

Por favor, tenga
en cuenta las
instrucciones
de uso 

Limitación de
temperatura 

2°C 25°C

12459/71362/TD175V5

 **brill**
P H A R M A