

Produktinformation Bergesonde

Product Information Recovery probe acc. to VOLLMAR





**Recovery probe
acc. to VOLLMAR**
less invasive
**one solution
one approach**

GEISTER®

Bedienungsanleitung User guide

Einführen der Ersatzschlinge. Hierzu finden Sie auch ein Video auf unserer Homepage www.gbluelabel.de

[How to insert the wire. Please also see the video on our internet homepage www.gbluelabel.de](http://www.gbluelabel.de)

1. Klemmschraube des Konus ablösen und Konus entfernen.

1. Open the screw of the cone and remove the cone.

2. Wählen Sie eine Drahtschlinge in der Größe des Ringdurchmessers. Die beiden Enden der Drahtschlinge sind miteinander verschweißt, um das Einführen zu erleichtern.

2. Choose a wire in the size of the ring. Both ends of the wire are welded for easy insertion.

3. Führen Sie das verschweißte Ende der Drahtschlinge über die Ringöffnung in den Schaft ein. Als Einführhilfe kann ein Nadelhalter verwendet werden.

3. Insert the welded end of the wire into the ring opening. A needle holder can help to push the wire into the shaft.

4. Führen Sie den Draht so weiter ein, bis die Schlinge im Ring ist.

4. Insert the wire until the loop reaches the ring.

5. Zuletzt positionieren Sie die Schlinge in der Nut des Rings.

5. The loop is positioned in the furrow.

6. Die Schlinge kann mit der Einfädelhilfe in der Nut platziert werden.

6. The threader can help to put the loop in place.

7. Führen Sie den Konus wieder ein und fixieren Sie den Konus und den darin liegenden Schlingendraht mit der Schraube.

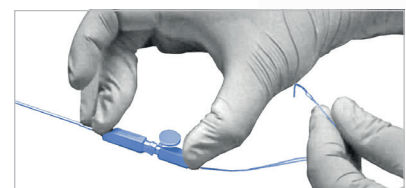
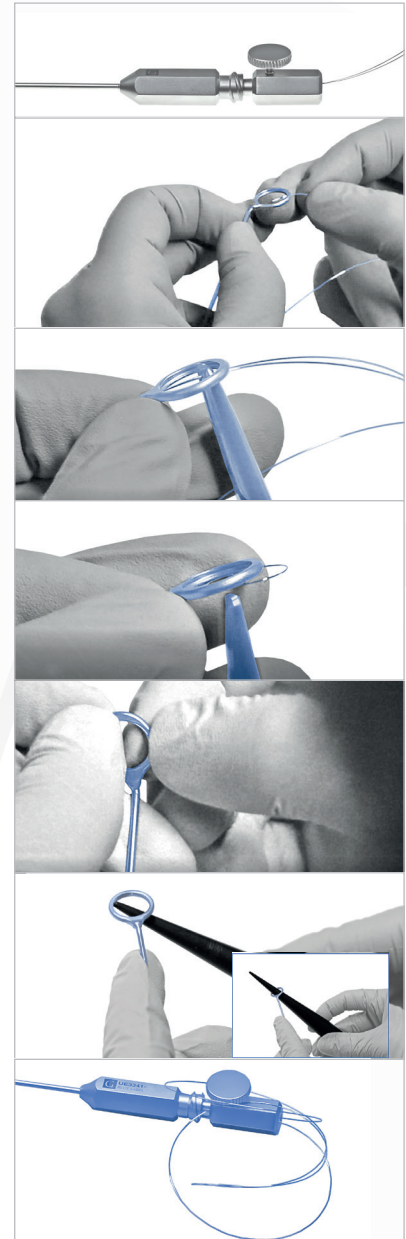
7. Enter the cone over the wire and fix both the shaft and the inserted wire with the screw.

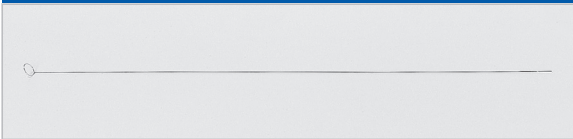
Hinweis: Nach der Anwendung wird der Schlingendraht über das Endstück herausgezogen. Die Ersatzschlingen sind für eine einmalige Anwendung vorgesehen! Die Bergesonde muss im OP sofort nach der Verwendung durchspült werden.

Important: After using the instrument in surgery, remove the wire by pulling out through the handle end. The wire is for single use only. The recovery probe must be flushed in the operation room immediately after usage.

Kontraindikationen: Das Instrument ist nicht für die Anwendung am zentralen Nerven- und Kreislaufsystem vorgesehen.

Contraindication: This medical device is not intended for use on the central nervous and circulatory system.

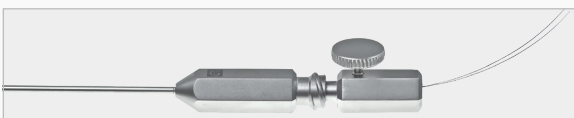
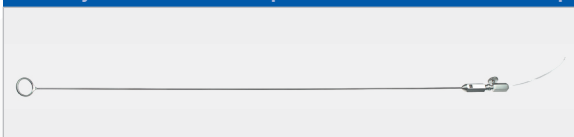


Bergesonden n. VOLLMAR, stumpf
 Recovery Probe acc. to VOLLMAR


Ø mm Outside mm	Artikel-Nr. Product no.
Satz bestehend aus 8 Größen (Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14) Set consisting of 8 sizes (Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14)	
	UE3315-00
2	UE3315-02-55
3	UE3315-03-55
4	UE3315-04-55
5	UE3315-05-55
6	UE3315-06-55
7	UE3315-07-55
8	UE3315-08-55
9	UE3315-09-55
10	UE3315-10-55
11	UE3315-11-55
12	UE3315-12-55
13	UE3315-13-55
14	UE3315-14-55
15	UE3315-15-55
16	UE3315-16-55
Länge 550 mm Länge/inch 21 ⁵ / ₈ Length 550 mm Length/inch 21 ⁵ / ₈	

Griff für Bergesonde n. VOLLMAR
 Handle for Recovery Probe acc. to VOLLMAR


Länge mm Length mm	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
90	3 1/2	UE3335

Drahtschlingen-Bergesonde n. VOLLMAR, scharf
 Recovery Probe with wire loop acc. to VOLLMAR, with wireloop


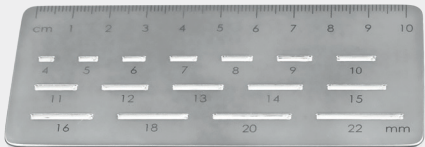
Ø mm Outside mm	Artikel-Nr. Product no.
Satz bestehend aus 7 Größen (Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Set consisting of 7 sizes (Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	
	UE3341-00
4	UE3341-04-40
5	UE3341-05-40
6	UE3341-06-40
7	UE3341-07-40
8	UE3341-08-40
9	UE3341-09-40
10	UE3341-10-40
11	UE3341-11-40
12	UE3341-12-40
13	UE3341-13-40
14	UE3341-14-40
15	UE3341-15-40
16	UE3341-16-40
18	UE3341-18-40
20	UE3341-20-40
22	UE3341-22-40
Länge 400 mm Länge/inch 15 ³ / ₄ Length 400 mm Length/inch 15 ³ / ₄	

Artikel-Nr.
Product no.

UE3403

Für 4 - 22 mm
For 4 - 22 mm

Vergleichslehre
Gauge



Artikel-Nr.
Product no.

UE3404

Einfädelhilfe, Kunststoff
Threader, Plastic



Artikel-Nr.
Product no.

UE3405

Konus für Bergesonde n. VOLLMAR
Cone for Recovery Probe acc. to VOLLMAR



Artikel-Nr.
Product no.

UE3406

Rändelschraube für Bergesonde n. VOLLMAR
Knurled screw for Recovery Probe acc. to VOLLMAR



Für Ø mm For Ø mm	Artikel-Nr. Product no.
4	UE3441-04-40
5	UE3441-05-40
6	UE3441-06-40
7	UE3441-07-40
8	UE3441-08-40
9	UE3441-09-40
10	UE3441-10-40
11	UE3441-11-40
12	UE3441-12-40
13	UE3441-13-40
14	UE3441-14-40
15	UE3441-15-40
16	UE3441-16-40
18	UE3441-18-40
20	UE3441-20-40
22	UE3441-22-40

Ersatzschlinge zu Drahtschlingen-Bergesonde n. VOLLMAR
Spare wire loop to Recovery Probe acc. to VOLLMAR



Artikel-Nr.
Product no.

UE3402

480 x 240 x 45 mm mit Deckel
480 x 240 x 45 mm with lid

Siebkorb für Bergesonde mit Spülsystem
Tray for Recovery probes with flushing systems

The better way to operate™

GEISTER®



GEISTER Medizintechnik GmbH

Föhrenstrasse 2 | D-78532 Tuttlingen | Germany

☎ +49 7461/966240 | 📠 +49 7461/9662422

www.gbluelabel.de | info@gbluelabel.de